

# Übersicht zu Drehmomenten für die Schraubensicherung

In dieser Tabelle finden Sie eine Übersicht zu den Drehmomenten für die Schraubensicherung aller FIOR & GENTZ Systemgelenke und Gelenkschienen für Knieorthesen. Die Angaben finden Sie ebenfalls im Rahmen einer ausführlichen Montageanleitung in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Artikels.

Systemknöchelgelenke	Schrauben	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm
NEURO CLASSIC	Schraube 1, Achsschraube (S1)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO SPRING	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO VARIO-CLASSIC	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO VARIO	Schraube 1, Achsschraube (S1)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO VARIO-SPRING	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO CLASSIC-SPRING	Pressschraube und Schraube 1 (S1)	2,5 Nm	4 Nm	6 Nm	6 Nm	6 Nm
NEURO CLASSIC-SWING						
NEURO VARIO-CLASSIC 2						
NEURO VARIO 2						
NEURO VARIO-SPRING 2,	Schraube 2, Achsschraube (S2)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO VARIO-SWING						
NEURO SWING-CLASSIC						
NEURO SWING						
NEURO SWING 2						
NEURO SWING H <sub>2</sub> O	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
<b>Systemkniegelenke</b>						
NEURO CLASSIC zero	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO VARIO zero	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO CLASSIC	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO VARIO	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO VARIO 2	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	-	-	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	-	4 Nm
NEURO VARIO-SWING	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	-	-	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	-	4 Nm
NEURO ACTIVE Systemkniegelenk	Schraube 1 (S1)	-	-	-	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	4 Nm	-
NEURO ACTIVE Systemgelenkschiene	Schraube 1 (S1)	4 Nm	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	4 Nm	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
NEURO CLASSIC H <sub>2</sub> O	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	-	-	4 Nm
NEURO MATIC	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	-	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	3 Nm	4 Nm
NEURO TRONIC	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	-	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	3 Nm	4 Nm
NEURO LOCK	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	-	3 Nm	3 Nm	3 Nm
NEURO LOCK MAX	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	3 Nm	3 Nm	4 Nm
NEURO FLEX MAX	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	3 Nm	3 Nm	4 Nm
NEURO LOCK H <sub>2</sub> O	Schraube 1 (S1)	-	-	-	-	3 Nm
	Schraube 2, Achsschraube (S2)	-	-	-	-	4 Nm
<b>Gelenkschienen für Knieorthesen</b>						
Gelenkschienen für Knieorthesen	Schraube 1 (S1)	4 Nm	4 Nm	-	-	-
	Schraube 2 (S2)	4 Nm	4 Nm	-	-	-

PB5500/2-WZ-2020-12