

Übersicht zu Drehmomenten für die Schraubensicherung

In dieser Tabelle finden Sie eine Übersicht zu den Drehmomenten für die Schraubensicherung aller FIOR & GENTZ Systemgelenke und Gelenkschienen für Knieorthesen. Die Angaben finden Sie ebenfalls im Rahmen einer ausführlichen Montageanleitung in der Gebrauchsanweisung des jeweiligen Artikels.

Systemknieelgelenke	Schrauben	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm	20 mm	24 mm
NEURO CLASSIC	Schraube 1, Achsschraube (S1)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
NEURO CLASSIC Carbon	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	-	4 Nm	-	-
NEURO VARIO-CLASSIC	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
NEURO VARIO	Schraube 1, Achsschraube (S1)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
NEURO VARIO-SPRING	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
NEURO CLASSIC-SPRING NEURO CLASSIC-SWING NEURO VARIO-CLASSIC 2 NEURO VARIO 2 NEURO VARIO-SPRING 2 NEURO VARIO-SWING NEURO SWING-CLASSIC NEURO SWING 2	Pressschraube und Schraube 1 (S1)	2,5 Nm	4 Nm	6 Nm	6 Nm	6 Nm	-
	Schraube 2, Achsschraube (S2)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
NEURO SWING	Schraube 2, Achsschraube (S2)	1,5 Nm	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	6 Nm
	Pressschraube und Schraube 1 (S1)	-	-	-	6 Nm	6 Nm	-
NEURO HISWING	Schraube 2, Achsschraube (S2)	-	-	-	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
Systemkniegelenke							
NEURO CLASSIC zero	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
NEURO VARIO zero	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
NEURO CLASSIC	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
NEURO VARIO	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
NEURO VARIO 2	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	-	-	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	-	4 Nm	-
NEURO VARIO-SWING	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	-	-	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	-	4 Nm	-
NEURO ACTIVE Systemkniegelenk	Schraube 1 (S1)	-	-	-	4 Nm	-	-
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	4 Nm	-	-
NEURO ACTIVE Systemgelenkschiene	Schraube 1 (S1)	4 Nm	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	4 Nm	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
NEURO CLASSIC Carbon	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	-	-	4 Nm	-
NEURO MATIC	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	-	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	3 Nm	4 Nm	-
NEURO TRONIC	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	-	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	-	-	3 Nm	4 Nm	-
NEURO HITRONIC	Schrauben der Funktionseinheit (S1 und S2)	-	-	-	-	3 Nm	-
	Schraube der Deckplatte, Achsschraube (S3)	-	-	-	-	4 Nm	-
	Schraube der Deckplatte (S4)	-	-	-	-	4 Nm	-
NEURO LOCK	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	-	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	-	3 Nm	3 Nm	3 Nm	-
NEURO LOCK MAX	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	3 Nm	3 Nm	4 Nm	-
NEURO FLEX MAX	Schraube 1, Achsschraube (S1)	-	3 Nm	4 Nm	4 Nm	4 Nm	-
	Schraube 2 (S2)	-	3 Nm	3 Nm	3 Nm	4 Nm	-
NEURO LOCK CARBON	Schraube 1 (S1)	-	-	-	-	3 Nm	-
	Schraube 2, Achsschraube (S2)	-	-	-	-	4 Nm	-
Gelenkschienen für Knieorthesen							
Gelenkschienen für Knieorthesen	Schraube 1 (S1)	4 Nm	4 Nm	-	-	-	-
	Schraube 2 (S2)	4 Nm	4 Nm	-	-	-	-

PB5500/2-WZ-2024-03