

## “Klopf Klopf”-Geste für die User App auf Ihrer Samsung Galaxy Watch

Die “Klopf Klopf”-Geste ermöglicht Ihnen eine vereinfachte Nutzung der User App auf Ihrer Samsung Galaxy Watch – mit einer einfachen Handbewegung.

Sie können folgende Aktionen mit der „Klopf Klopf“-Geste durchführen:

- die User App starten
- das Systemkniefelenk kurzzeitig im Auto-Modus entsperren, um sich hinzusetzen

Sie können die „Klopf Klopf“-Geste entweder über Ihr Android Smartphone oder Ihre Samsung Galaxy Watch aktivieren.

Wenn Sie Ihr Smartphone nutzen möchten, um die „Klopf Klopf“-Geste zu aktivieren, folgen Sie den Anweisungen **A**.



Wenn Sie Ihre Samsung Galaxy Watch nutzen möchten, um die “Klopf Klopf“-Geste zu aktivieren, folgen Sie den Anweisungen **B**.


## Die “Klopf Klopf”-Geste für die User App auf Ihrer Samsung Galaxy Watch einrichten

Falls Sie es noch nicht getan haben, verbinden Sie Ihre Orthese mit der User App auf Ihrer Samsung Galaxy Watch. Folgen Sie den Anweisungen in der User App.

### A. Einrichten auf Ihrem Android Smartphone

Richten Sie die “Klopf Klopf”-Geste auf Ihrem **Android Smartphone** mit der **Galaxy Wearable** App ein


1. Starten Sie die **Galaxy Wearable** App  auf Ihrem Smartphone.
2. Gehen Sie zu **Uhreinstellungen**  in der App.
3. Gehen Sie zu **Tasten und Gesten** > **“Klopf Klopf”** und aktivieren Sie **“Klopf Klopf”**.
4. Tippen Sie auf **Option auswählen**, streichen Sie zu **User** und tippen Sie darauf.

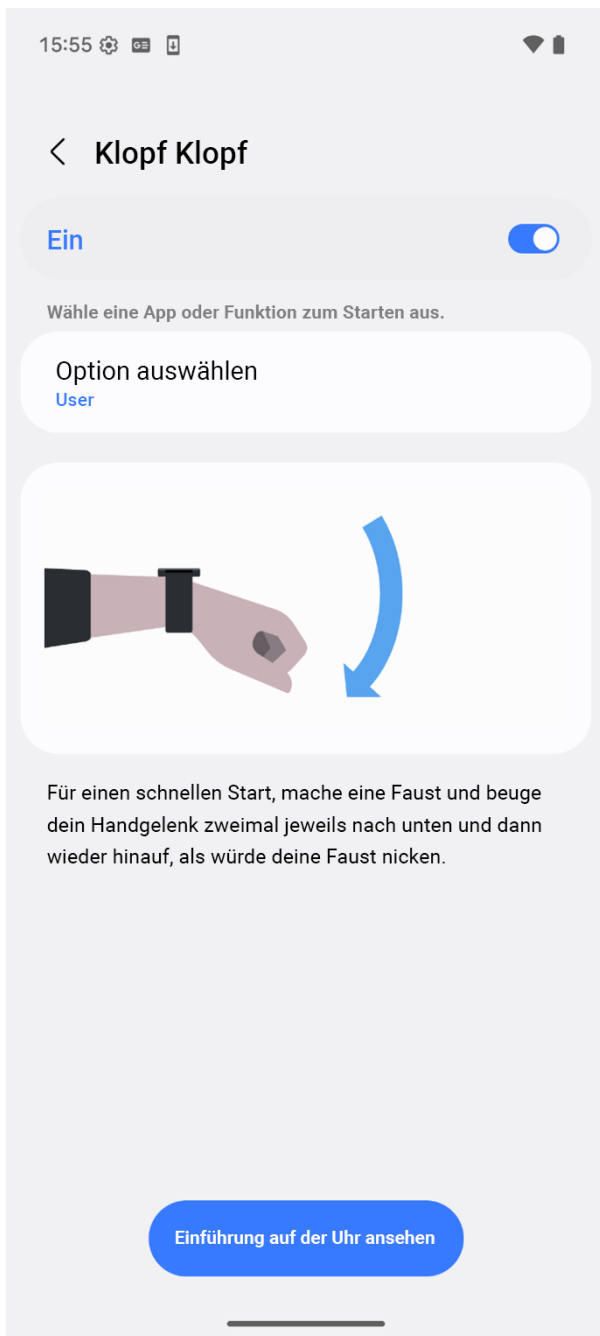

**Tipp:** Um zu erfahren, wie Sie die „Klopf Klopf“-Geste verwenden, tippen Sie unter dem Punkt **Option auswählen** auf **Einführung auf der Uhr ansehen**. Eine interaktive Animation zeigt Ihnen, wie Sie die Geste ausführen und perfektionieren können.

## B. Einrichten auf Ihrer Samsung Galaxy Watch

Richten Sie die “Klopf Klopf”-Geste auf Ihrer **Samsung Galaxy Watch ein**

1. Gehen Sie zu Einstellungen  auf Ihrer Samsung Galaxy Watch.
2. Gehen Sie zu **Tasten und Gesten** > **“Klopf Klopf“** und aktivieren Sie **“Klopf Klopf“**.
3. Tippen Sie auf **Option auswählen**, streichen sie zu **User** und tippen Sie darauf.



**Tip:** Um zu erfahren, wie Sie die „Klopf Klopf“-Geste verwenden, tippen Sie unter dem Punkt **Option auswählen** auf **Ausprobieren**. Eine interaktive Animation zeigt Ihnen, wie Sie die Geste ausführen und perfektionieren können.

## Nutzen Sie die “Klopf Klopf”-Geste mit der User App auf Ihrer Samsung Galaxy Watch

Ziehen Sie die Orthese an und stellen Sie den Auto-Modus ein. Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um die “Klopf Klopf”-Geste mit der User App zu nutzen:

1. Wecken Sie das Samsung Galaxy Watch Display (Heben Sie Ihr Handgelenk).
2. Nutzen Sie die “Klopf Klopf”-Geste, um die User App zu öffnen.
3. Die User App öffnet sich und zeigt den aktuell ausgewählten Modus an. Wenn der Auto-Modus ausgewählt ist, nutzen Sie die “Klopf Klopf” Funktion, um das Systemkniefgelenk kurzzeitig zu entsperren und sich hinzusetzen.