



Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
<b>Systemgelenk</b>						
1	SB9669-L0840	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS1910-040	Gleitscheibe, Ø = 19 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS1910-045					
3	GS1910-050					
3	GS1910-055					
3	GS1910-060					
4	PN1000-L05/5	Extensionsanschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5a	BP1110-L050	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SJ0152-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SJ0152-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
7	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
<b>Systemanker und Systemschienen</b>						
9	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

\* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten