



Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB9669-L0840	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3a	SJ9022-E000	0° Extensionsanschlag	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
3	SJ9022-E005	5° Extensionsanschlag				
3b	SJ9022-E010	10° Extensionsanschlag				
3c	SJ9022-E020	20° Extensionsanschlag				
3d	SJ9022-E030	30° Extensionsanschlag				
4	GS1910-040	Gleitscheibe, Ø = 19 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS1910-045					
4	GS1910-050					
4	GS1910-055					
4	GS1910-060					
5	PN1000-L05/5	Extensionsanschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6a	BP1110-L050	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SJ0192-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SJ0192-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
8	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
9	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Systemanker und Systemschienen						
10	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten