



| Pos. | 16 mm | Bezeichnung | Mögliches Problem | Maßnahme | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|---------------------------------------|---------------|---|-----------------------|-------------|---|--------------------------|
| Systemgelenk | | | | | | |
| 1 | SB1069-L0960 | Splintbolzen | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 3 | GS2311-040 | Gleitscheibe, Ø = 23 mm | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 3 | GS2311-045 | | | | | |
| 3 | GS2311-050 | | | | | |
| 3 | GS2311-055 | | | | | |
| 3 | GS2311-060 | | | | | |
| 4 | PN1000-L05/5 | Extensionsanschlagdämpfer | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 6 Monaten |
| 5a | BP1211-L055 | Gleitbuchse | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 6 | SJ0153-L/AL | Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 6 | SJ0153-R/AL | Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium | | | | |
| 7 | SC1405-L12 | Senkschraube mit Innensechsrund | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 8 | SC1406-L12 | Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube) | | | | |
| Systemanker und Systemschienen | | | | | | |
| 9 | siehe Katalog | Systemanker und Systemschienen | Verschleiß oder Bruch | austauschen | alle 6 Monate | nach Bedarf |

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten