



Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB1069-L0960	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3a	SJ9023-E000	butée d'extension de 0°	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
3	SJ9023-E005	butée d'extension de 5°				
3b	SJ9023-E010	butée d'extension de 10°				
3c	SJ9023-E020	butée d'extension de 20°				
3d	SJ9023-E030	butée d'extension de 30°				
4	GS2311-040	rondelle de friction, Ø = 23 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
4	GS2311-045					
4	GS2311-050					
4	GS2311-055					
4	GS2311-060					
5	PN1000-L05/5	amortisseur de la butée d'extension	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6a	BP1211-L055	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SJ0193-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
7	SJ0193-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1405-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
9	SC1406-L12	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
Ancre modulaires et montants modulaires						
10	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient