



Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB1069-L1060	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS2311-040	Gleitscheibe, Ø = 23 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2311-045					
3	GS2311-050					
3	GS2311-055					
3	GS2311-060					
4	PN1000-L05/5	Extensionsanschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5a	BP1211-L055	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SL0153-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SL0153-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
7	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1406-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Systemanker und Systemschienen						
9	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten