



Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB1069-L1020	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS2611-040	Gleitscheibe, Ø = 26 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2611-045					
3	GS2611-050					
3	GS2611-055					
3	GS2611-060					
4	PN1000-L05/5	Extensionsanschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	6 Monaten
5a	BP1211-L060	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SJ0155-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SJ0155-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
7	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1406-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Systemanker und Systemschienen						
9	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten