



Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB1069-L1220	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	GS2611-040	rondelle de friction, Ø = 26 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2611-045					
3	GS2611-050					
3	GS2611-055					
3	GS2611-060					
4	VE3771-012/26	amortisseur à joint torique	usure	remplacer	tous les 6 mois	6 mois
5a	BP1211-L060	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SL0265-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SL0265-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium**				
7a	VE3771-11/15	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	6 mois
7c	VE3771-04/10	joint torique pour le blocage de la vis de limitation du mouvement**			tous les 6 mois	18 mois
9	PN0006-L02	amortisseur de butée**	usure	remplacer	tous les 6 mois	6 mois
11	SL0285-06	butée d'extension**	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
12	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
13	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
6-13	SL2955-L	ensemble fonctionnel modularité plug + go, latérale gauche ou médiale droite***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6-13	SL2955-R	ensemble fonctionnel modularité plug + go, médiale gauche ou latérale droite***				

Commission des patients/ID de configuration _____

Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Mécanismes de ressort						
14	VE3771-08/10	joint torique pour le blocage du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	6 mois
15	SH5803-15/07	mécanisme de ressort, bleu, normal, liberté de mouvement max. 15°	usure glissement des rondelles Belleville	remplacer réaligner les rondelles Belleville à l'aide d'une pince	tous les 6 mois	18 mois
15	SH5803-15/15	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°				
15	SH5803-10/21	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°	bruit du mécanisme de ressort avec ressort de pression	graisser le ressort de pression avec de la graisse pour articulation d'orthèse ou de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
15	SH5803-10/31	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
15	SH5803-05/63	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°				
Étriers de pied modulaires, ancrés modulaires et montants modulaires						
16	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

*** composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément