


Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

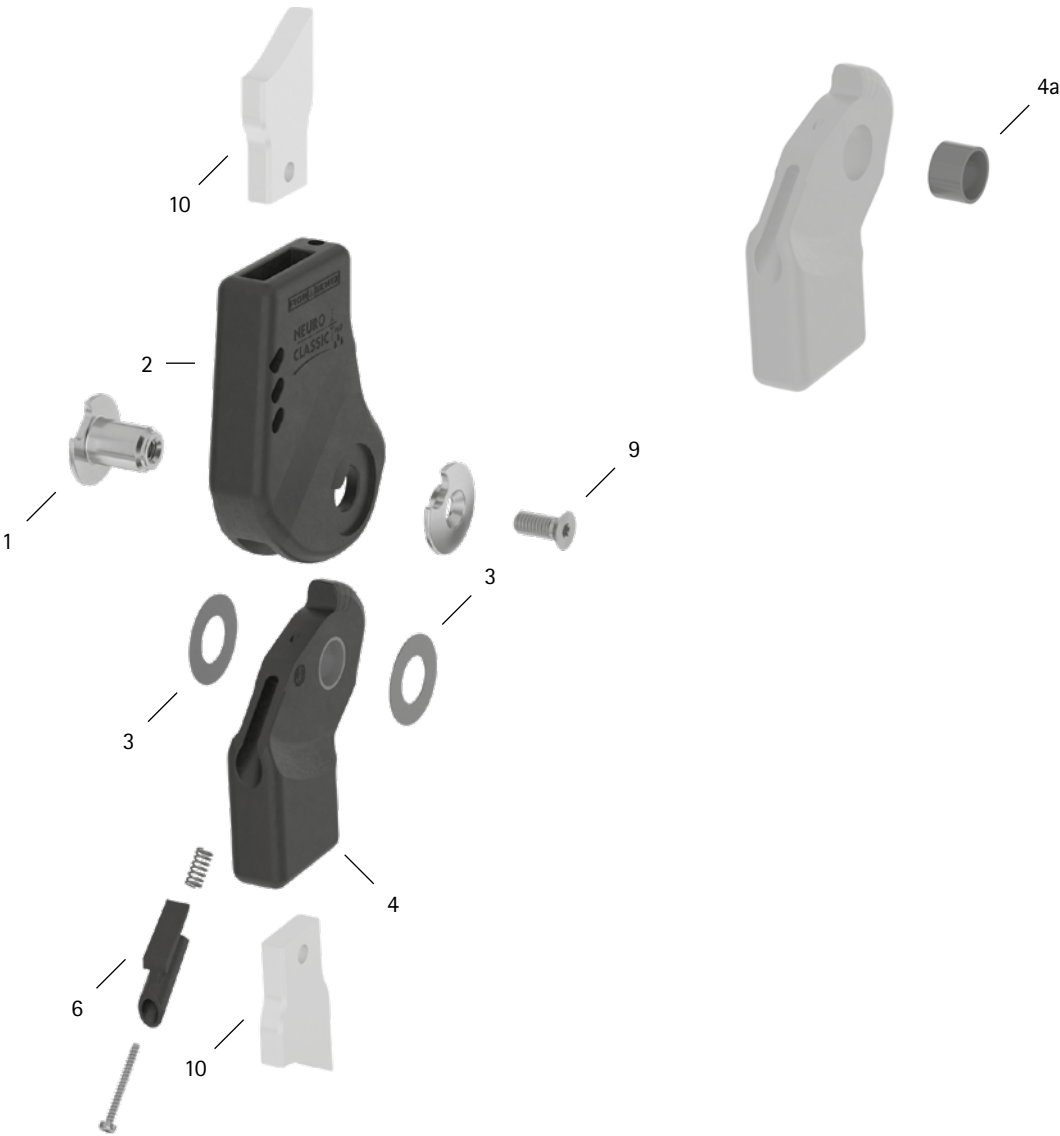

Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SK0895-1/C	Splintbolzen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
2	SL0105-C	Oberteil, gerade, Carbon	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
3	GS2413-040	Gleitscheibe, Ø = 24 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2413-045					
3	GS2413-050					
3	GS2413-055					
3	GS2413-060					
4	SK0815-2/C	5° Unterteil mit Gleitbuchse, gerade, Carbon-Titan-Hybrid	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
4a	BP1412-L090	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SK9805-E005/C	5° Extensionsanschlag	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
9	SC1406-L14	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Systemanker und Systemschienen						
10	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten