



Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SK0250-ST	Grundplatte	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2	GS2210-050	Gleitscheibe	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	BB9665-89	Bronzebuchse, Ø = 9,6 mm, h = 5,89 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	BB9665-92	Bronzebuchse, Ø = 9,6 mm, h = 5,92 mm				
3	BB9665-95	Bronzebuchse, Ø = 9,6 mm, h = 5,95 mm				
3	BB9665-98	Bronzebuchse, Ø = 9,6 mm, h = 5,98 mm				
4	BK0203-AL	Oberschenkelschienenflügel, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	BK0213-AL	Unterschenskelschienenflügel, Aluminium				
6a	BK9051-E000	0° Extensionsanschlag/80° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
6	BK9051-E005	5° Extensionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6b	BK9051-E010	10° Extensionsanschlag/70° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6c	BK9051-E020	20° Extensionsanschlag/60° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6d	BK9051-E030	30° Extensionsanschlag/50° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nicht notwendig
6e	BK9051-F000	0° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6f	BK9051-F005	5° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6g	BK9051-F010	10° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6h	BK9051-F020	20° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nicht notwendig
6i	BK9051-F030	30° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
7	SK0251-ST	Deckplatte	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1016-L13	Senkschraube mit Innensechskant und Ansatz	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten