



Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SK0250-ST	Grundplatte	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2	GS2210-050	Gleitscheibe	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	BB9666-89	Bronzebuchse, Ø = 9,6 mm, h = 6,89 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	BB9666-92	Bronzebuchse, Ø = 9,6 mm, h = 6,92 mm				
3	BB9666-95	Bronzebuchse, Ø = 9,6 mm, h = 6,95 mm				
3	BB9666-98	Bronzebuchse, Ø = 9,6 mm, h = 6,98 mm				
4	BK0205-AL	Oberschenkelschienenflügel, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	BK0215-AL	Unterschenskelschienenflügel, Aluminium				
6a	BK9061-E000	0° Extensionsanschlag/80° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
6	BK9061-E005	5° Extensionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6b	BK9061-E010	10° Extensionsanschlag/70° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6c	BK9061-E020	20° Extensionsanschlag/60° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6d	BK9061-E030	30° Extensionsanschlag/50° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nicht notwendig
6e	BK9061-F000	0° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6g	BK9061-F010	10° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6h	BK9061-F020	20° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6i	BK9061-F030	30° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
7	SK0251-ST	Deckplatte	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1016-L14	Senkschraube mit Innensechskant und Ansatz	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten