



Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SK0250-ST	plaque inférieure	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2	GS2210-050	rondelle de friction	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	BB9666-89	douille en bronze, Ø=9,6 mm, H= 6,89 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	BB9666-92	douille en bronze, Ø=9,6 mm, H= 6,92 mm				
3	BB9666-95	douille en bronze, Ø=9,6 mm, H= 6,95 mm				
3	BB9666-98	douille en bronze, Ø=9,6 mm, H= 6,98 mm				
4	BK0205-AL	branche de montant fémorale, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
5	BK0215-AL	branche de montant tibiale, aluminium				
6a	BK9061-E000	butée d'extension de 0°/butée de flexion de 80° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
6	BK9061-E005	butée d'extension de 5° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente				
6b	BK9061-E010	butée d'extension de 10°/butée de flexion de 70° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente				
6c	BK9061-E020	butée d'extension de 20°/butée de flexion de 60° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente				
6d	BK9061-E030	butée d'extension de 30°/butée de flexion de 50° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente	usure	remplacer	tous les 6 mois	pas nécessaire
6e	BK9061-F000	butée de flexion de 0° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente				
6g	BK9061-F010	butée de flexion de 10° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente				
6h	BK9061-F020	butée de flexion de 20° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente				
6i	BK9061-F030	butée de flexion de 30° avec 2 vis à tête cylindrique avec fente				
7	SK0251-ST	plaque supérieure	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
8	SC1016-L14	vis à tête fraisée à six pans creux avec collet	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient