



Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
<b>Systemgelenk</b>						
1	SK0250-ST	Grundplatte	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2	GS2210-050	Gleitscheibe	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	BB9664-92	Bronzebuchse, Ø = 9,6 mm, h = 4,92 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	BB9664-95	Bronzebuchse, Ø = 9,6 mm, h = 4,95 mm				
3	BB9664-98	Bronzebuchse, Ø = 9,6 mm, h = 4,98 mm				
4	SK0203-L/ST	Oberteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	SK0203-R/ST	Oberteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl				
4	SK0223-L/ST	Oberteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl				
4	SK0223-R/ST	Oberteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl				
5	SK0213-L/ST	Unterteil, links lateral oder rechts medial, gerade, Stahl	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	SK0213-R/ST	Unterteil, links medial oder rechts lateral, gerade, Stahl				
5	SK0233-L/ST	Unterteil, links lateral oder rechts medial, nach innen gekröpft, Stahl				
5	SK0233-R/ST	Unterteil, links medial oder rechts lateral, nach innen gekröpft, Stahl				

Patientenkommission/Konfigurations-ID \_\_\_\_\_

Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
6a	BK9051-E000	0° Extensionsanschlag/80° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
6	BK9051-E005	5° Extensionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6b	BK9051-E010	10° Extensionsanschlag/70° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6c	BK9051-E020	20° Extensionsanschlag/60° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6d	BK9051-E030	30° Extensionsanschlag/50° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6e	BK9051-F000	0° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nicht notwendig
6f	BK9051-F005	5° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6g	BK9051-F010	10° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6h	BK9051-F020	20° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
6i	BK9051-F030	30° Flexionsanschlag mit 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz				
7	SK0251-ST	Deckplatte	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1016-L12	Senkschraube mit Innensechskant und Ansatz	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
<b>Systemanker und Systemschienen</b>						
9	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

\* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten