



Pos.	12 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
<b>Systemgelenk</b>						
1	SB6049-L0850	Splintbolzen (Sperrklinke)	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2	SB7049-L0850	Splintbolzen (Gelenkachse)				
4	FE1414-01	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SK9801-E005	5° Extensionsanschlag	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
7a	SK9801-E010	10° Extensionsanschlag				
7b	SK9801-E015	15° Extensionsanschlag				
7c	SK9801-E020	20° Extensionsanschlag				
7d	SK9801-E025	25° Extensionsanschlag				
7e	SK9801-E030	30° Extensionsanschlag				

Patientenkommission/Konfigurations-ID \_\_\_\_\_

Pos.	12 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
8	SK0771-L/025	Sperrklinke**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SK0771-L/038					
8	SK0771-L/050					
8	SK0771-L/063					
10	GS1807-040	Gleitscheibe, Ø = 18 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	GS1807-045					
10	GS1807-050					
10	GS1807-055					
10	GS1807-060					
12	FE1407-01	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
14a	BP0807-L056	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
15	SK0761-2L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
15	SK0761-2R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
16	SC1404-L12	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
17	SC1404-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
<b>Kabelzug (falls vorhanden). Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren.</b>						
18	ZS1000-L400	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
18	ZS1000-L500	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm				
18	ZS1000-L600	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm				
18	ZS1000-L700	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm				
18	ZS1100-L400	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm				
18	ZS1100-L500	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm				
<b>Systemanker und Systemschienen</b>						
19	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

\* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

\*\* Falls Sie statt der hier aufgeführten Sperrklinken für links lateral oder rechts medial eine Sperrklinke für rechts lateral oder links medial benötigen, ersetzen Sie das L in der Artikelnummer durch ein R. Beispiel: SK0771-R/025.