



| Pos. | 12 mm | Bezeichnung | Mögliches Problem | Maßnahme | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------|---|--------------------------|
| Systemgelenk | | | | | | |
| 1 | SB6049-L0850 | Splintbolzen (Sperrklinke) | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 2 | SB7049-L0850 | Splintbolzen (Gelenkachse) | | | | |
| 4 | FE1414-01 | Druckfeder | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 7 | SK9801-E005 | 5° Extensionsanschlag | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | nach Bedarf |
| 7a | SK9801-E010 | 10° Extensionsanschlag | | | | |
| 7b | SK9801-E015 | 15° Extensionsanschlag | | | | |
| 7c | SK9801-E020 | 20° Extensionsanschlag | | | | |
| 7d | SK9801-E025 | 25° Extensionsanschlag | | | | |
| 7e | SK9801-E030 | 30° Extensionsanschlag | | | | |

Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

| Pos. | 12 mm | Bezeichnung | Mögliches Problem | Maßnahme | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|--|---------------|--|-----------------------|-------------|---|--------------------------|
| 8 | SK0761-L/038 | Rastensperrklinke** | Verschleiß der Rasten | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten*** |
| 8 | SK0761-L/050 | | | | | |
| 8 | SK0761-L/063 | | | | | |
| 8 | SK0761-L/075 | | | | | |
| 10 | GS1807-040 | Gleitscheibe, Ø = 18 mm | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 10 | GS1807-045 | | | | | |
| 10 | GS1807-050 | | | | | |
| 10 | GS1807-055 | | | | | |
| 10 | GS1807-060 | | | | | |
| 12 | FE1407-01 | Druckfeder | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 14 | SK0791-2L/TI | 5° Rastenschlagsscheibe mit Gleitbuchse, 5°-55°, in 10°-Schritten, links lateral oder rechts medial, Titan | Verschleiß der Rasten | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten*** |
| 14 | SK0791-2R/TI | 5° Rastenschlagsscheibe mit Gleitbuchse, 5°-55°, in 10°-Schritten, links medial oder rechts lateral, Titan | | | | |
| 14a | BP0807-L056 | Gleitbuchse | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 15 | SK0761-2L/AL | Deckplatte, links lat. oder rechts med., Aluminium | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 15 | SK0761-2R/AL | Deckplatte, links med. oder rechts lat., Aluminium | | | | |
| 16 | SC1404-L12 | Senkschraube mit Innensechsrund | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 17 | SC1404-L12 | Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube) | | | | |
| Kabelzug (falls vorhanden). Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren. | | | | | | |
| 18 | ZS1000-L400 | Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 18 | ZS1000-L500 | Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm | | | | |
| 18 | ZS1000-L600 | Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm | | | | |
| 18 | ZS1000-L700 | Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm | | | | |
| 18 | ZS1100-L400 | Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm | | | | |
| 18 | ZS1100-L500 | Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm | | | | |
| Systemanker und Systemschienen | | | | | | |
| 19 | siehe Katalog | Systemanker und Systemschienen | Verschleiß oder Bruch | austauschen | alle 6 Monate | nach Bedarf |

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** Falls Sie statt der hier aufgeführten Rastensperrklinken für links lateral oder rechts medial eine Rastensperrklinke für rechts lateral oder links medial benötigen, ersetzen Sie das L in der Artikelnummer durch ein R. Beispiel: SK0761-R/038.

*** Die Rastensperrklinke und die Rastenschlagsscheibe unterliegen einem höheren Verschleiß. Dadurch können sich die Wartungsintervalle verkürzen.