



Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB6049-L0950	Splintbolzen (Sperrklinke)	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2	SB8559-L0950	Splintbolzen (Gelenkachse)				
4	FE1520-01	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SK9802-E005	5° Extensionsanschlag	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
7a	SK9802-E010	10° Extensionsanschlag				
7b	SK9802-E015	15° Extensionsanschlag				
7c	SK9802-E020	20° Extensionsanschlag				
7d	SK9802-E025	25° Extensionsanschlag				
7e	SK9802-E030	30° Extensionsanschlag				

WFO100-DE-2023-01

Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
8	SK0762-L/025	Rastensperrklinke**	Verschleiß der Rasten	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten***
8	SK0762-L/050					
8	SK0762-L/063					
8	SK0762-L/075					
8	SK0762-L/088					
8	SK0762-L/100					
10	GS2009-040	Gleitscheibe, Ø = 20 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	GS2009-045					
10	GS2009-050					
10	GS2009-055					
10	GS2009-060					
12	FE1411-02	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
14	SK0792-2L/TI	5° Rastenanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, 5°-55°, in 10°-Schritten, links lateral oder rechts medial, Titan	Verschleiß der Rasten	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten***
14	SK0792-2R/TI	5° Rastenanschlagsscheibe mit Gleitbuchse, 5°-55°, in 10°-Schritten, links medial oder rechts lateral, Titan				
14a	BP1009-L065	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
15	SK0762-2L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
15	SK0762-2R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
16	SC1404-L12	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
17	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Kabelzug (falls vorhanden). Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren.						
18	ZS1000-L400	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
18	ZS1000-L500	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm				
18	ZS1000-L600	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm				
18	ZS1000-L700	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm				
18	ZS1100-L400	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm				
18	ZS1100-L500	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm				
Systemanker und Systemschienen						
19	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** Falls Sie statt der hier aufgeführten Rastensperrklinke für links lateral oder rechts medial eine Rastensperrklinke für rechts lateral oder links medial benötigen, ersetzen Sie das L in der Artikelnummer durch ein R. Beispiel: SK0762-R/025.

*** Die Rastensperrklinke und die Rastenanschlagsscheibe unterliegen einem höheren Verschleiß. Dadurch können sich die Wartungsintervalle verkürzen.