


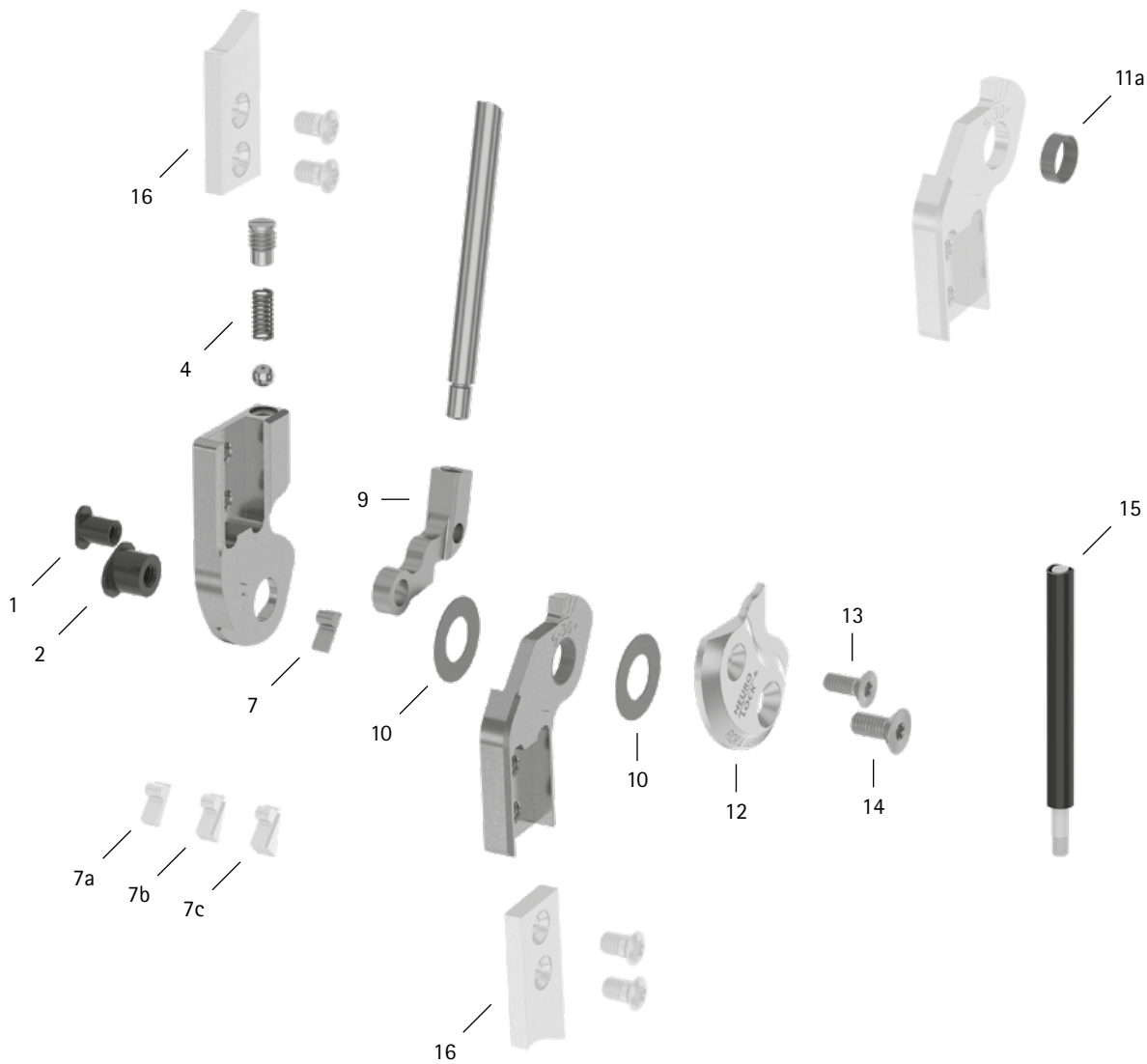

| Pos.         | 16 mm        | Bezeichnung                | Mögliches Problem | Maßnahme    | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|--------------|--------------|----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Systemgelenk |              |                            |                   |             |                                         |                          |
| 1            | SB6044-L0750 | Splintbolzen (Sperrklinke) | Verschleiß        | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 2            | SB9664-L0750 | Splintbolzen (Gelenkachse) |                   |             |                                         |                          |
| 4            | FE1414-02    | Druckfeder                 | Verschleiß        | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 7            | SK9603-E005  | 5° Extensionsanschlag      | Verschleiß        | austauschen | alle 6 Monate                           | nach Bedarf              |
| 7a           | SK9603-E010  | 10° Extensionsanschlag     |                   |             |                                         |                          |
| 7b           | SK9603-E020  | 20° Extensionsanschlag     |                   |             |                                         |                          |
| 7c           | SK9603-E030  | 30° Extensionsanschlag     |                   |             |                                         |                          |

WP0101-DE-2023-01

Patientenkommission/Konfigurations-ID \_\_\_\_\_

| Pos.                                                                                                                                | 16 mm         | Bezeichnung                                             | Mögliches Problem     | Maßnahme    | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| 9                                                                                                                                   | SK0473-TI038  | Sperrklinke                                             | Verschleiß            | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 9                                                                                                                                   | SK0473-TI050  |                                                         |                       |             |                                         |                          |
| 9                                                                                                                                   | SK0473-TI063  |                                                         |                       |             |                                         |                          |
| 9                                                                                                                                   | SK0473-TI075  |                                                         |                       |             |                                         |                          |
| 9                                                                                                                                   | SK0473-TI088  |                                                         |                       |             |                                         |                          |
| 9                                                                                                                                   | SK0473-TI100  |                                                         |                       |             |                                         |                          |
| 10                                                                                                                                  | GS1910-040    | Gleitscheibe, Ø = 19 mm                                 | Verschleiß            | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 10                                                                                                                                  | GS1910-045    |                                                         |                       |             |                                         |                          |
| 10                                                                                                                                  | GS1910-050    |                                                         |                       |             |                                         |                          |
| 10                                                                                                                                  | GS1910-055    |                                                         |                       |             |                                         |                          |
| 10                                                                                                                                  | GS1910-060    |                                                         |                       |             |                                         |                          |
| 11a                                                                                                                                 | BP1110-L035   | Gleitbuchse                                             | Verschleiß            | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 12                                                                                                                                  | SK0453-2L/AL  | Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium | Verschleiß            | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 12                                                                                                                                  | SK0453-2R/AL  | Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium |                       |             |                                         |                          |
| 13                                                                                                                                  | SC1404-L10    | Senkschraube mit Innensechsrund                         | Verschleiß            | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 14                                                                                                                                  | SC1405-L11    | Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)          |                       |             |                                         |                          |
| Kabelzug (falls vorhanden). Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren. |               |                                                         |                       |             |                                         |                          |
| 15                                                                                                                                  | ZS1000-L400   | Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm           | Verschleiß            | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 15                                                                                                                                  | ZS1000-L500   | Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm           |                       |             |                                         |                          |
| 15                                                                                                                                  | ZS1000-L600   | Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm           |                       |             |                                         |                          |
| 15                                                                                                                                  | ZS1000-L700   | Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm           |                       |             |                                         |                          |
| 15                                                                                                                                  | ZS1100-L400   | Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm         |                       |             |                                         |                          |
| 15                                                                                                                                  | ZS1100-L500   | Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm         |                       |             |                                         |                          |
| Systemanker und Systemschienen                                                                                                      |               |                                                         |                       |             |                                         |                          |
| 16                                                                                                                                  | siehe Katalog | Systemanker und Systemschienen                          | Verschleiß oder Bruch | austauschen | alle 6 Monate                           | nach Bedarf              |

\* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten