


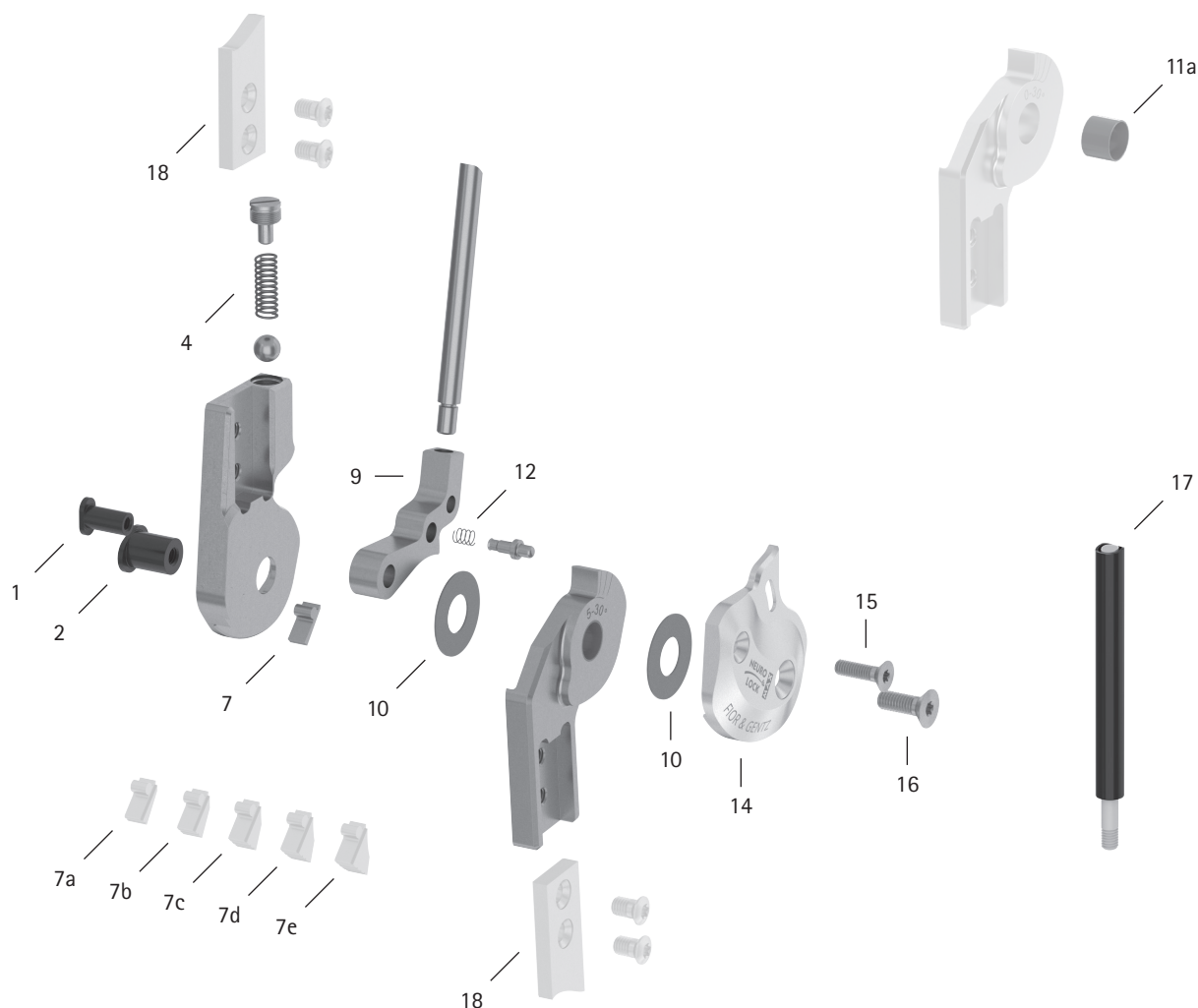

Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB6049-L1130	Splintbolzen (Sperrklinke)	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2	SB9669-L1130	Splintbolzen (Gelenkachse)				
4	FE1527-01	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SK9803-E005	5° Extensionsanschlag	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
7a	SK9803-E010	10° Extensionsanschlag				
7b	SK9803-E015	15° Extensionsanschlag				
7c	SK9803-E020	20° Extensionsanschlag				
7d	SK9803-E025	25° Extensionsanschlag				
7e	SK9803-E030	30° Extensionsanschlag				

Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
9	SK0773-L/038	Sperrklinke**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
9	SK0773-L/044					
9	SK0773-L/050					
9	SK0773-L/063					
9	SK0773-L/075					
9	SK0773-L/088					
9	SK0773-L/100					
10	GS2210-040	Gleitscheibe, Ø = 22 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	GS2210-045					
10	GS2210-050					
10	GS2210-055					
10	GS2210-060					
11a	BP1110-L078	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
12	FE1411-02	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
14	SK0863-2L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
14	SK0863-2R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
15	SC1404-L14	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
16	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Kabelzug (falls vorhanden). Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren.						
17	ZS1000-L400	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
17	ZS1000-L500	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm				
17	ZS1000-L600	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm				
17	ZS1000-L700	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm				
17	ZS1100-L400	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm				
17	ZS1100-L500	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm				
Systemanker und Systemschienen						
18	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** Falls Sie statt der hier aufgeführten Sperrklinken für links lateral oder rechts medial eine Sperrklinke für rechts lateral oder links medial benötigen, ersetzen Sie das L in der Artikelnummer durch ein R. Beispiel: SK0775-R/025.