


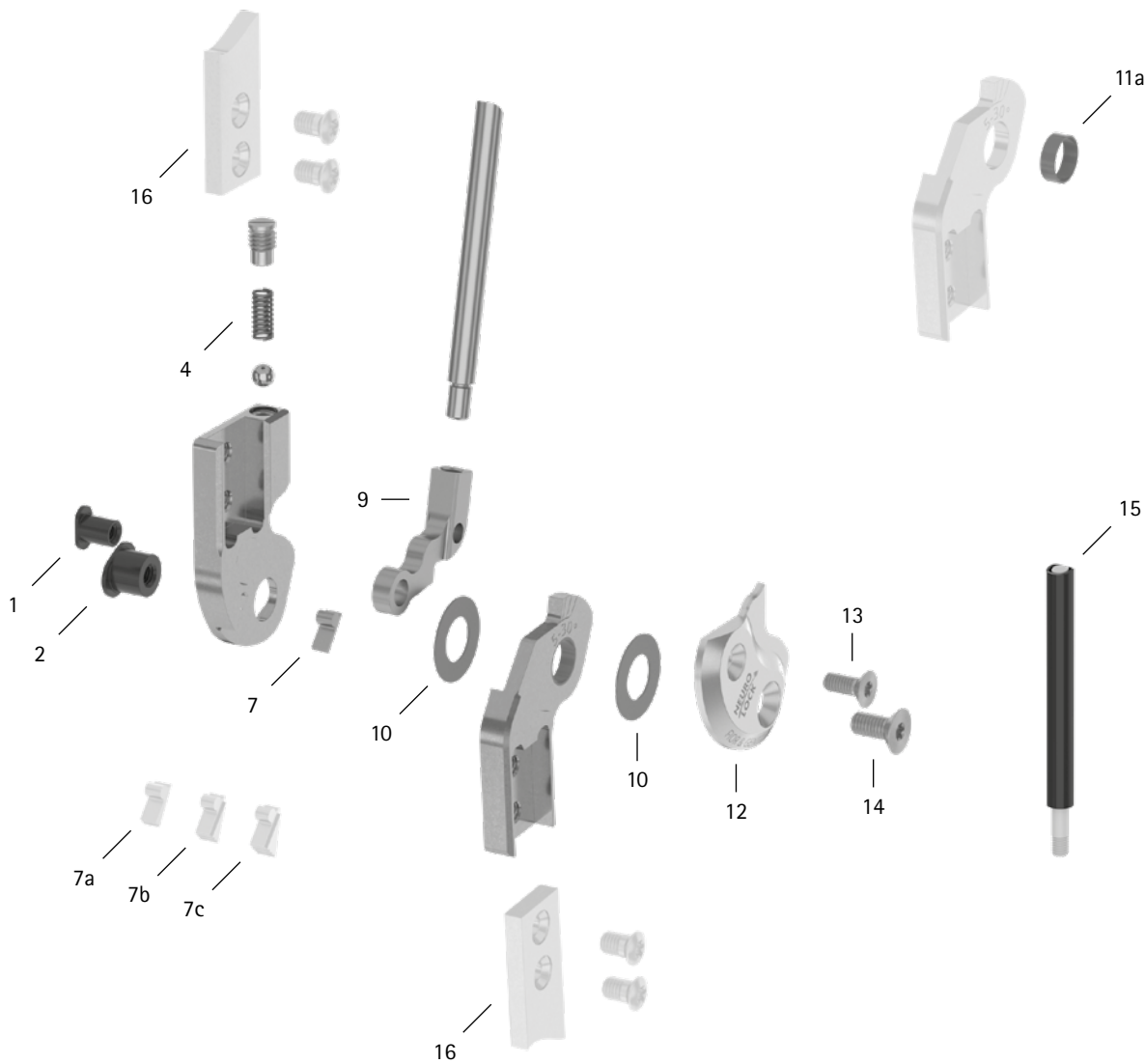

Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB6044-L0820	Splintbolzen (Sperrklinke)	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2	SB9664-L0820	Splintbolzen (Gelenkachse)				
4	FE1414-02	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SK9605-E005	5° Extensionsanschlag	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
7a	SK9605-E010	10° Extensionsanschlag				
7b	SK9605-E020	20° Extensionsanschlag				
7c	SK9605-E030	30° Extensionsanschlag				

Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
9	SK0475-TI050	Sperrklinke	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
9	SK0475-TI063					
9	SK0475-TI075					
9	SK0475-TI088					
9	SK0475-TI100					
10	GS2210-040	Gleitscheibe, Ø = 22 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	GS2210-045					
10	GS2210-050					
10	GS2210-055					
10	GS2210-060					
11a	BP1110-L040	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
12	SK0455-2L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
12	SK0455-2R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
13	SC1404-L12	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
14	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Kabelzug (falls vorhanden). Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren.						
15	ZS1000-L400	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
15	ZS1000-L500	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm				
15	ZS1000-L600	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm				
15	ZS1000-L700	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm				
15	ZS1100-L400	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm				
15	ZS1100-L500	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm				
Systemanker und Systemschienen						
16	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten