



Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
Articulation modulaire						
1	SB8559-L1290	boulon à goupille fendue (cliquet de verrouillage)	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
2	SB1069-L1290	boulon à goupille fendue (axe d'articulation)				
4	FE2726-01	ressort de pression	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
7	SK9805-E005	butée d'extension de 5°	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
7a	SK9805-E010	butée d'extension de 10°				
7b	SK9805-E015	butée d'extension de 15°				
7c	SK9805-E020	butée d'extension de 20°				
7d	SK9805-E025	butée d'extension de 25°				
7e	SK9805-E030	butée d'extension de 30°				

Commission des patients/ID de configuration _____

Pos.	20 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
9	SK0775-L/025	cliquet de verrouillage**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
9	SK0775-L/038					
9	SK0775-L/050					
9	SK0775-L/063					
9	SK0775-L/075					
9	SK0775-L/088					
10	GS2411-040	rondelle de friction, Ø = 24 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
10	GS2411-045					
10	GS2411-050					
10	GS2411-055					
10	GS2411-060					
11a	BP1211-L090	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
12	FE1411-02	ressort de pression	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
14	SK0865-2L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
14	SK0865-2R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium				
15	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
16	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)				
Câble de traction (si disponible). Il vous faut, pour monter un câble de traction sur le levier de blocage, un adaptateur pour câble de traction par levier de blocage.						
17	ZS1000-L400	câble de traction, câble en nylon avec gaine, 400 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
17	ZS1000-L500	câble de traction, câble en nylon avec gaine, 500 mm				
17	ZS1000-L600	câble de traction, câble en nylon avec gaine, 600 mm				
17	ZS1000-L700	câble de traction, câble en nylon avec gaine, 700 mm				
17	ZS1100-L400	câble de traction, séparable par raccord, 400 mm				
17	ZS1100-L500	câble de traction, séparable par raccord, 500 mm				
Ancres modulaires et montants modulaires						
18	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

** Au cas où au lieu des cliquets de verrouillage indiqués ici pour latérale gauche ou médiale droite, il vous faut un cliquet de verrouillage pour médiale gauche ou latérale droite, remplacer le L dans la référence par un R. Exemple : SK0772-R/038.