


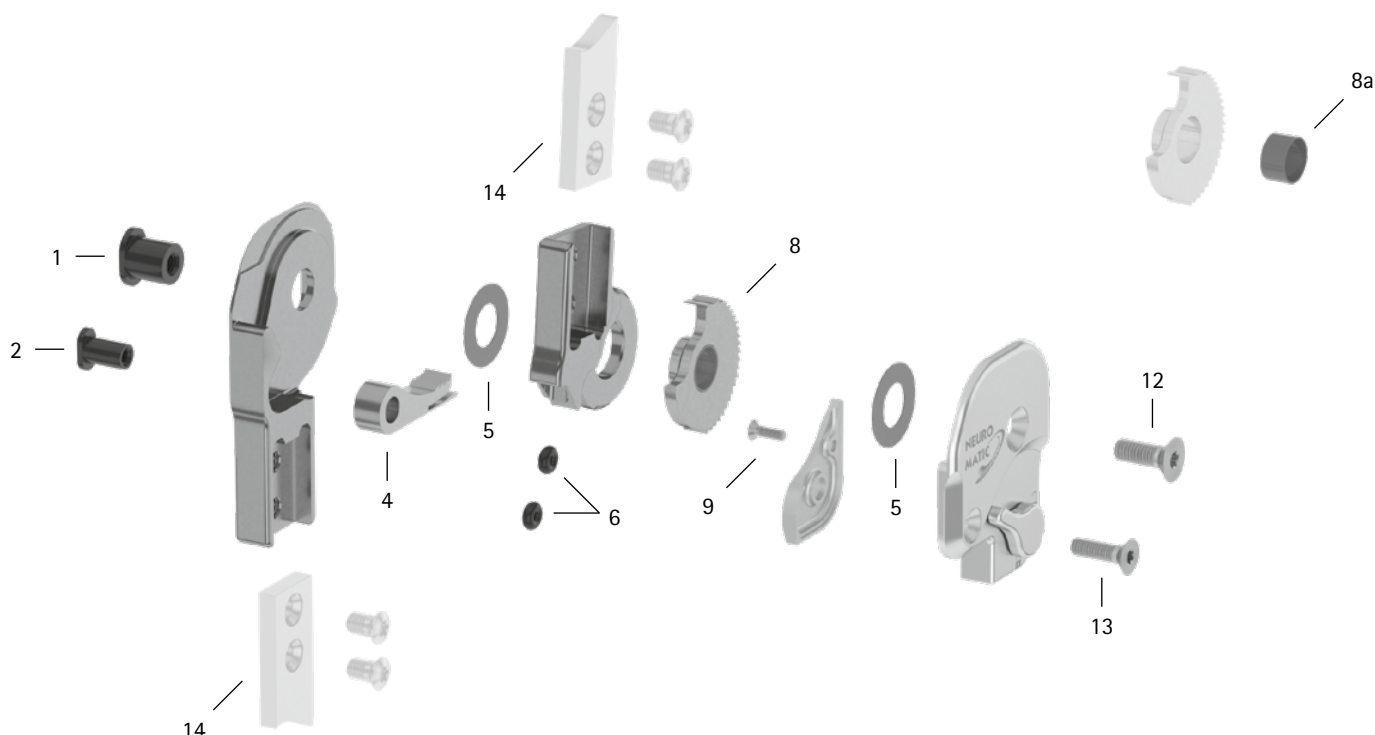

Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB1069-L1000	Splintbolzen (Gelenkachse)	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2	SB8559-L1000	Splintbolzen (Sperrklinke)				
4	SK0375-2	Sperrklinke	Verschleiß der Zähne	austauschen	alle 3 Monate	12 Monaten bei Aktivitätsgrad 1 und 2 9 Monaten bei Aktivitätsgrad 3 6 Monaten bei Aktivitätsgrad 4
5	GS2411-040	Gleitscheibe, Ø = 24 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5	GS2411-045					
5	GS2411-050					
5	GS2411-055					
5	GS2411-060					
6	VE3771-D/012/26	O-Ring-Dämpfer-Set	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
8	SK0365-2L	Zahnkranz mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, Titan	Verschleiß der Zähne	austauschen	alle 3 Monate	12 Monaten bei Aktivitätsgrad 1 und 2
8	SK0365-2R	Zahnkranz mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, Titan				9 Monaten bei Aktivitätsgrad 3 6 Monaten bei Aktivitätsgrad 4
8a	BP1211-L059	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	SC1403-L08/1	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
12	SC1406-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
13	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund**				
9-13	SK3383-L	Funktionseinheit, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
9-13	SK3383-R	Funktionseinheit, links medial oder rechts lateral***				
Systemanker und Systemschienen						
14	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar