



Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB9669-L0990	Splintbolzen (Gelenkachse)	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2	SB6049-L0990	Splintbolzen (Sperrklinke)				
4	SK0373	Sperrklinke	Verschleiß der Zähne	austauschen	alle 3 Monate	12 Monaten bei Aktivitätsgrad 1 und 2
						9 Monaten bei Aktivitätsgrad 3
						6 Monaten bei Aktivitätsgrad 4

Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
5	GS1910-040	Gleitscheibe, Ø = 19 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5	GS1910-045					
5	GS1910-050					
5	GS1910-055					
5	GS1910-060					
6	VE3771-D/012/26	O-Ring-Dämpfer-Set	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
8	SK0363-2L	Zahnkranz mit Gleitbuchse, links lateral oder rechts medial, Titan	Verschleiß der Zähne	austauschen	alle 3 Monate	12 Monaten bei Aktivitätsgrad 1 und 2
8	SK0363-2R	Zahnkranz mit Gleitbuchse, links medial oder rechts lateral, Titan				9 Monaten bei Aktivitätsgrad 3 6 Monaten bei Aktivitätsgrad 4
8a	BP1110-L059	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	SC1403-L08/1	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
12	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
13	SC1404-L14	Senkschraube mit Innensechsrund**				
14	SK0385	Hubmagneteinheit**	Verschmutzung	Hubmagnet und Kolben von Schmutz befreien	alle 3 Monate	36 Monaten
9-14	SK3883-L	Funktionseinheit, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
9-14	SK3883-R	Funktionseinheit, links medial oder rechts lateral***				
15a	ET3850	Steuereinheit mit Bluetooth mit Lithium-Polymer-Akku	veraltete Software schlechter Akkuzustand	Software aktualisieren Steuereinheit austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
15b	ET0712-01	Anschlusskabel für Hubmagneten, unilateral, 300 mm	Beschädigung	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
15b	ET0712-02	Anschlusskabel für Hubmagneten, bilateral, 420 mm				
Fernbedienung						
16	ET3840-P	Fernbedienung mit Bluetooth für den Patienten	veraltete Software	Software aktualisieren	alle 6 Monate	36 Monaten
Software für mobile Endgeräte						
-	-	Software für mobile Endgeräte (Betriebssystem, Expert App, User App)	Sicherheitslücken in der Software	aktualisieren	alle 6 Monate	nach Bedarf
Systemanker und Systemschienen						
17	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar