



Pos.	12 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Überprüfung/ ggf. Austausch	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB8559-L0930	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS1609-040	Gleitscheibe, Ø = 16 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS1609-045					
3	GS1609-050					
3	GS1609-055					
3	GS1609-060					
4	VE3771-010/20	O-Ring-Dämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5a	BP1009-L050	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SL0261-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SL0261-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
7	VE3771-04/10	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	PN0003-L02	Anschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
11	SL0281-04	Extensionsanschlag	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	-
12	SC1404-L12	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
13	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)			alle 6 Monate	36 Monaten
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
14	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	-