


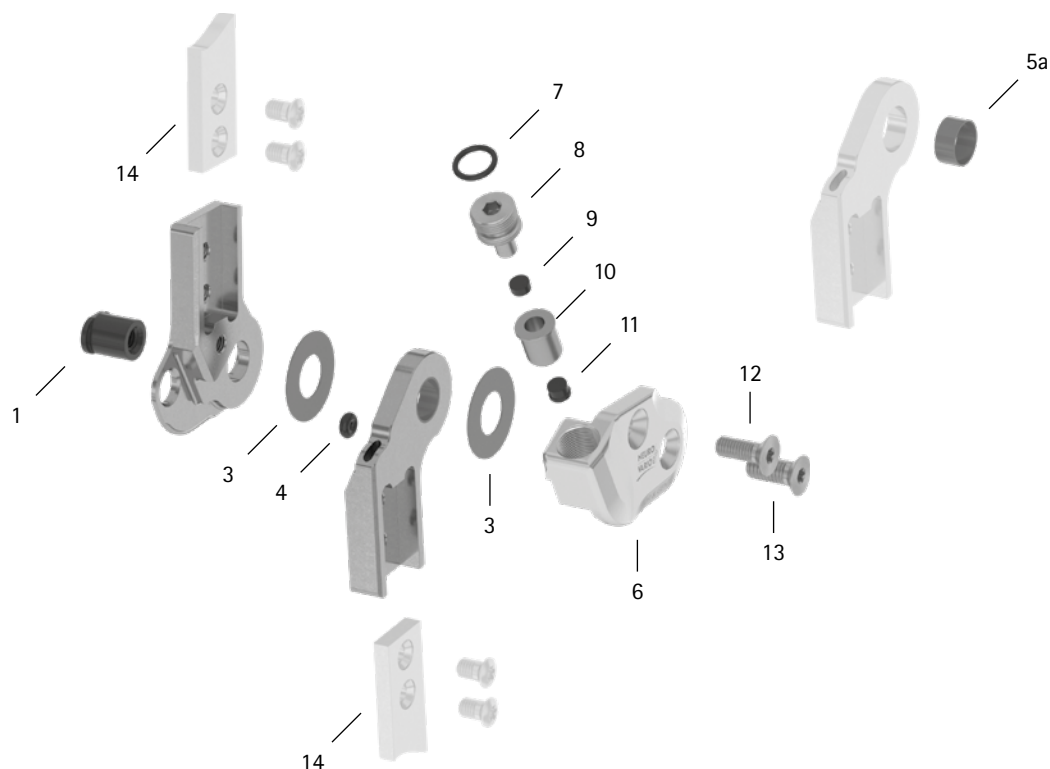

Pos.	12 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB8559-L0930	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS1609-040	Gleitscheibe, Ø = 16 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS1609-045					
3	GS1609-050					
3	GS1609-055					
3	GS1609-060					
4	VE3771-010/20	O-Ring-Dämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5a	BP1009-L050	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SL0261-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SL0261-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium**				
7	VE3771-04/10	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	PN0003-L02	Anschlagdämpfer**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
11	SL0281-04	Extensionsanschlag**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
12	SC1404-L12	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
13	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
6-13	SL2931-L	Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6-13	SL2931-R	Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral***				
Systemanker und Systemschienen						
14	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar