



Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Überprüfung/ ggf. Austausch	Spätester Austausch nach
<b>Systemgelenk</b>						
1	SB9669-L0950	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS1910-040	Gleitscheibe, Ø = 19 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS1910-045					
3	GS1910-050					
3	GS1910-055					
3	GS1910-060					
4	VE3771-010/20	O-Ring-Dämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5a	BP1110-L050	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SL0262-LJ/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SL0262-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
7	VE3771-050/10	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	PN0004-L02	Anschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
11	SL0282-04	Extensionsanschlag	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	-
12	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
13	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)			alle 6 Monate	36 Monaten
<b>Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen</b>						
14	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	-