



Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Überprüfung/ ggf. Austausch	Spätester Austausch nach
<b>Systemgelenk</b>						
1	SB1069-L1060	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS2311-040	Gleitscheibe, Ø = 23 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2311-045					
3	GS2311-050					
3	GS2311-055					
3	GS2311-060					
4	VE3771-012/26	O-Ring-Dämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5a	BP1211-L055	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SL0263-LJ/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SL0263-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium				
7	VE3771-08/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	PN0005-L02	Anschlagdämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
11	SL0283-05	Extensionsanschlag	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	-
12	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
13	SC1406-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)			alle 6 Monate	36 Monaten
<b>Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen</b>						
14	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	-