


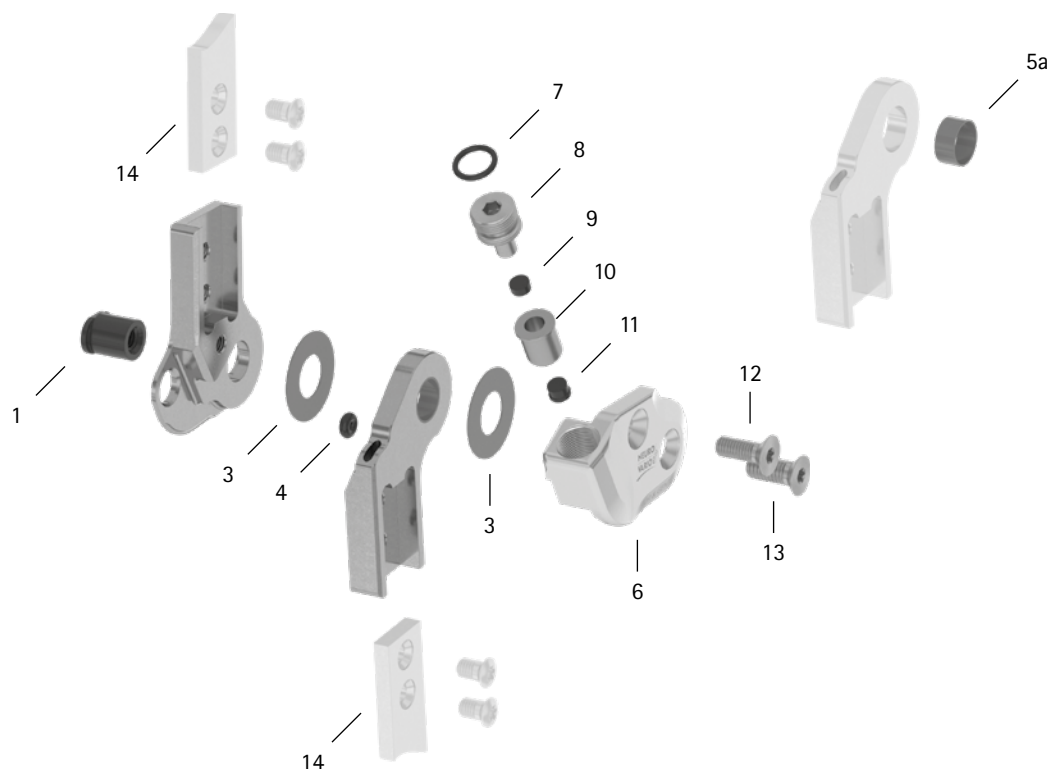

Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB1069-L1060	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS2311-040	Gleitscheibe, Ø = 23 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2311-045					
3	GS2311-050					
3	GS2311-055					
3	GS2311-060					
4	VE3771-012/26	O-Ring-Dämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5a	BP1211-L055	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SL0263-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial, Aluminium**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SL0263-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral, Aluminium**				
7	VE3771-08/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	PN0005-L02	Anschlagdämpfer**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
11	SL0283-05	Extensionsanschlag**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
12	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
13	SC1406-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
6-13	SL2933-L	Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6-13	SL2933-R	Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral***				
Systemanker und Systemschienen						
14	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar