


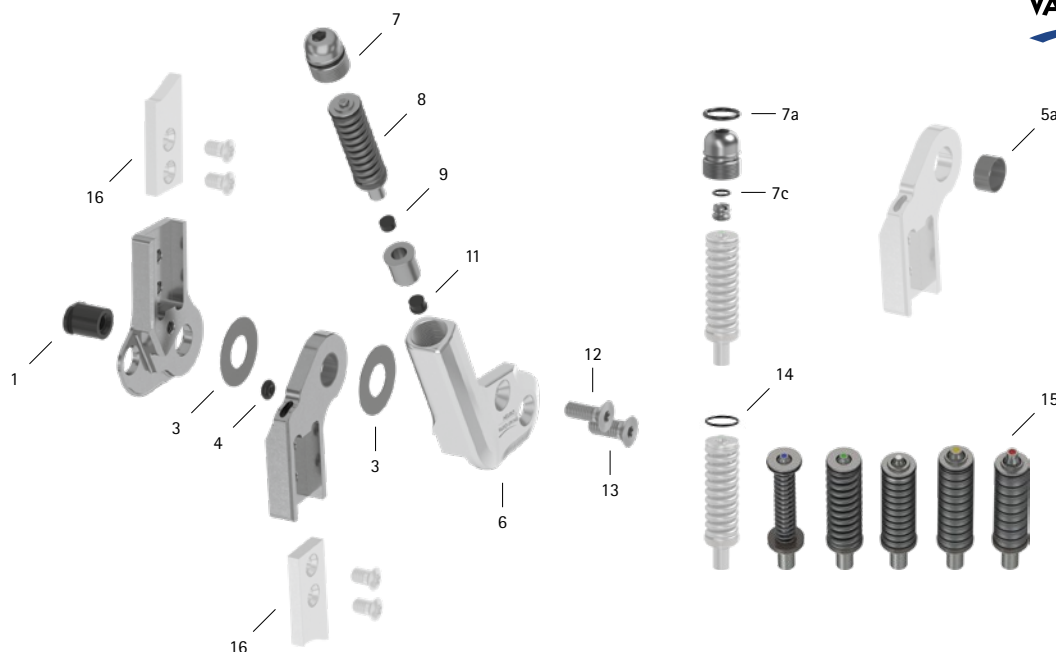

Pos.	12 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB8559-L0930	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS1609-040	Gleitscheibe, Ø = 16 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS1609-045					
3	GS1609-050					
3	GS1609-055					
3	GS1609-060					
4	VE3771-010/20	O-Ring-Dämpfer	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5a	BP1009-L050	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SL0251-L/AL	Deckplatte, links lat. oder rechts med., Aluminium**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SL0251-R/AL	Deckplatte, links med. oder rechts lat., Aluminium**				
7a	VE3771-06/11	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7c	VE3771-03/10	O-Ring zur Sicherung der Bewegungs-limitierungs-schraube**			alle 6 Monate	18 Monaten
9	PN0003-L02	Anschlagdämpfer**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
11	SL0281-04	Extensionsanschlag**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
12	SC1404-L12	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
13	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
6-13	SL2951-L	Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6-13	SL2951-R	Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral***				
Federeinheiten						
14	VE3771-045/10	O-Ring zur Sicherung der Federeinheit**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
15	SH5800-15/02	Federeinheit, blau, normal, max. 9° Bewegungsfreiheit**	Verrutschen der Tellerfedern	Tellerfedern mit Zange neu ausrichten	alle 6 Monate	18 Monaten
15	SH5800-15/04	Federeinheit, grün, mittel, max. 9° Bewegungsfreiheit**				
15	SH5800-10/06	Federeinheit, weiß, stark, max. 6° Bewegungsfreiheit**	Geräusche der Federeinheit mit Druckfeder	Druckfeder mit Orthesengelenkfett oder Sprühöl (Art.-Nr. FT3000-15) fetten		
15	SH5800-10/09	Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 6° Bewegungsfreiheit**				
15	SH5800-05/17	Federeinheit, rot, extra stark, max. 3° Bewegungsfreiheit**	Geräusche der Federeinheit mit Tellerfedern	Tellerfedern seitlich mit Sprühöl (Art.-Nr. FT3000-15) fetten		
Systemanker und Systemschienen						
16	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar