



Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Articulation modulaire</b>						
1	SB1069-L1060	boulon à goupille fendue	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
3	GS2311-040	rondelle de friction, Ø = 23 mm	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
3	GS2311-045					
3	GS2311-050					
3	GS2311-055					
3	GS2311-060					
4	VE3771-012/26	amortisseur à joint torique	usure	remplacer	tous les 6 mois	6 mois
5a	BP1211-L055	douille de guidage	usure	remplacer	tous les 6 mois	18 mois
6	SL0253-L/AL	plaque supérieure, latérale gauche ou médiale droite, aluminium**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6	SL0253-R/AL	plaque supérieure, médiale gauche ou latérale droite, aluminium**				
7a	VE3771-09/15	joint torique pour le blocage de la vis de réglage sur orthèse**	usure	remplacer	tous les 6 mois	6 mois
7c	VE3771-04/10	joint torique pour le blocage de la vis de limitation du mouvement**			tous les 6 mois	18 mois
9	PN0005-L02	amortisseur de butée**	usure	remplacer	tous les 6 mois	6 mois
11	SL0283-05	butée d'extension**	usure	remplacer	tous les 6 mois	au besoin
12	SC1405-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple**	usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
13	SC1406-L14	vis à tête fraisée avec empreinte à denture multiple (vis axiale)**				
6-13	SL2953-L	ensemble fonctionnel modularité plug + go, latérale gauche ou médiale droite***	perte de fonctionnalité, usure	remplacer	tous les 6 mois	36 mois
6-13	SL2953-R	ensemble fonctionnel modularité plug + go, médiale gauche ou latérale droite***				

Commission des patients/ID de configuration \_\_\_\_\_

Pos.	16 mm	Désignation	Problème possible	Solution	Contrôle recommandé, remplacement potentiel*	Remplacement au plus tard après
<b>Mécanismes de ressort</b>						
14	VE3771-07/10	joint torique pour le blocage du mécanisme de ressort	usure	remplacer	tous les 6 mois	6 mois
15	SH5802-15/05	mécanisme de ressort, bleu, normal, liberté de mouvement max. 15°	usure glissement des rondelles Belleville	remplacer réaligner les rondelles Belleville à l'aide d'une pince	tous les 6 mois	18 mois
15	SH5802-15/11	mécanisme de ressort, vert, moyen, liberté de mouvement max. 15°	bruit du mécanisme de ressort avec ressort de pression	graisser le ressort de pression avec de la graisse pour articulation d'orthèse ou de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
15	SH5802-09/16	mécanisme de ressort, blanc, fort, liberté de mouvement max. 10°		graisser les rondelles Belleville avec de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
15	SH5802-10/29	mécanisme de ressort, jaune, très fort, liberté de mouvement max. 10°				
15	SH5802-05/53	mécanisme de ressort, rouge, ultra-fort, liberté de mouvement max. 5°	bruit du mécanisme de ressort avec des rondelles Belleville	graisser les rondelles Belleville avec de l'huile en spray (Réf. FT3000-15)		
<b>Étriers de pied modulaires, ancrés modulaires et montants modulaires</b>						
16	voir catalogue	ancres modulaires et montants modulaires	usure ou rupture	remplacer	tous les 6 mois	au besoin

\* selon l'estimation du distributeur du produit sur mesure concernant le comportement d'utilisation du patient

\*\* fait partie intégrante de l'ensemble fonctionnel

\*\*\* composants modulaires compris peuvent également être remplacés séparément