


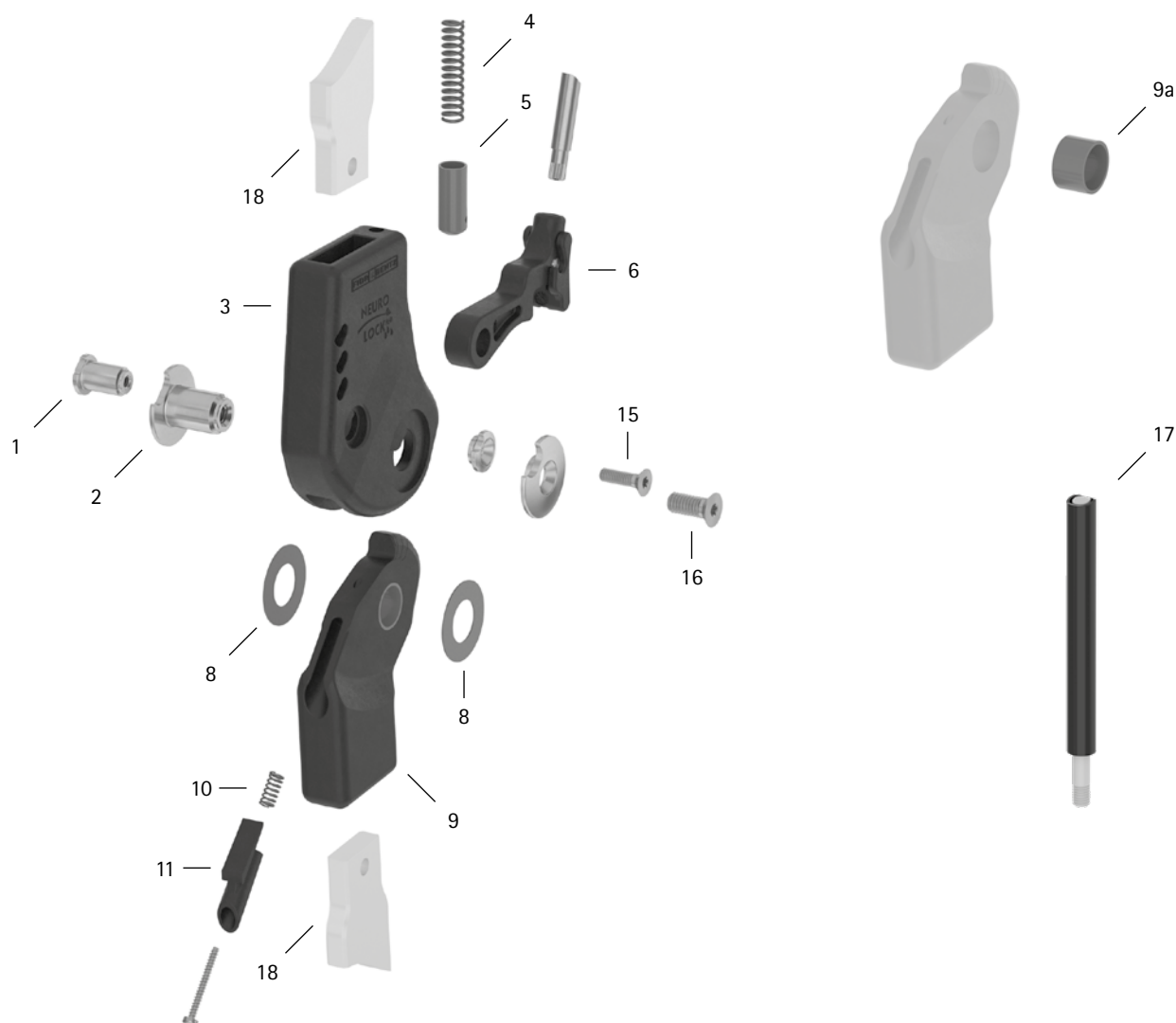

Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SK0892-3/C	Splintbolzen (Sperrklinke)	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
2	SK0892-1/C	Splintbolzen (Gelenkachse)		austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
3	SK0802-C	Oberteil, gerade, Carbon	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
4	FE1526-01	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5	SK0872-10/C	Federführung	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
6	SK0872-5/C	Sperrklinke mit Fixierklinke, Carbon-Titan-Hybrid	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
8	GS2009-040	Gleitscheibe, Ø = 20 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
8	GS2009-045					
8	GS2009-050					
8	GS2009-055					
8	GS2009-060					

Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
9	SK0812-2/C	5° Unterteil mit Gleitbuchse, gerade, Carbon-Titan-Hybrid	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
9a	BP1009-L059	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	FE1510-02	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
11	SK9802-E005/C	5° Extensionsanschlag	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
15	SC1403-L08	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
16	SC1404-L10	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Kabelzug (falls vorhanden). Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren.						
17	ZS1000-L400	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
17	ZS1000-L500	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm				
17	ZS1000-L600	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm				
17	ZS1000-L700	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm				
17	ZS1100-L400	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm				
17	ZS1100-L500	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm				
Systemanker und Systemschienen						
18	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
-	-	Klebeverbindung (Systemschiene/Systemanker und Systemgelenk)	Bruch	neues System- bauteil aus Carbon einkleben	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten