



Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SK0893-3/C	Splintbolzen (Sperrklinke)	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
2	SK0893-1/C	Splintbolzen (Gelenkachse)				
3	SK0803-C	Oberteil, gerade, Carbon	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
4	FE1526-01	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5	SK0872-10/C	Federführung	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
6	SK0873-5/C	Sperrklinke mit Fixierklinke, Carbon-Titan-Hybrid	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
8	GS2311-040	Gleitscheibe, Ø = 23 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
8	GS2311-045					
8	GS2311-050					
8	GS2311-055					
8	GS2311-060					

Patientenkommission/Konfigurations-ID _____



Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
9	SK0813-2/C	5° Unterteil mit Gleitbuchse, gerade, Carbon-Titan-Hybrid	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
9a	BP1211-L077	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	FE1510-02	Druckfeder	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
11	SK9803-E005/C	5° Extensionsanschlag	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
15	SC1404-L12	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
16	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Kabelzug (falls vorhanden). Sie benötigen einen Kabelzugadapter pro Sperrklinke, um einen Kabelzug an die Sperrklinke zu montieren.						
17	ZS1000-L400	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 400 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
17	ZS1000-L500	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 500 mm				
17	ZS1000-L600	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 600 mm				
17	ZS1000-L700	Kabelzug, Nylonzug mit Bowdenzughülle, 700 mm				
17	ZS1100-L400	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 400 mm				
17	ZS1100-L500	Kabelzug, trennbar durch Kupplungsstück, 500 mm				
Systemanker und Systemschienen						
18	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
-	-	Klebeverbindung (Systemschiene/Systemanker und Systemgelenk)	Bruch	neues Systembauteil aus Carbon einkleben	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten