



Pos.	10 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB6039-L0480	Splintbolzen, kurz**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0390-01	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	GS1206-040	Gleitscheibe, Ø = 12 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5	GS1206-045					
5	GS1206-050					
5	GS1206-055					
5	GS1206-060					
6	SF0160-AL	Deckplatte**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SC1403-L08	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1403-L08	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
1, 6-8	SF1970-AL	Funktionseinheit plug + go Modularität***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
9	BP0706-L020	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
11	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar