



| Pos. | 12 mm | Bezeichnung | Mögliches Problem | Maßnahme | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|---|---------------|--|-----------------------|-------------|---|--------------------------|
| Systemgelenk | | | | | | |
| 1 | SB7049-L0590 | Splintbolzen | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 2a | SC9604-L06ST | Justierschraube | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | nach Bedarf |
| 3 | GS4007 | Gewindesicherungsstift | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | nach Bedarf |
| 4 | GS1407-040 | Gleitscheibe, Ø = 14 mm | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 4 | GS1407-045 | | | | | |
| 4 | GS1407-050 | | | | | |
| 4 | GS1407-055 | | | | | |
| 4 | GS1407-060 | | | | | |
| 5 | SF0261-AL | Deckplatte | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 6 | SC1404-L08 | Senkschraube mit Innensechsrund | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 7 | SC1404-L08 | Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube) | | | | |
| Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen | | | | | | |
| 8 | BR0807-L020 | Gleitbuchse | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 9 | siehe Katalog | Systemfußbügel | Verschleiß oder Bruch | austauschen | alle 6 Monate | 48 Monaten |
| 10 | siehe Katalog | Systemanker und Systemschienen | Verschleiß oder Bruch | austauschen | alle 6 Monate | nach Bedarf |

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten