



Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB8559-L0620	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2a	SC9605-L08ST	Justierschraube	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
3	GS4007	Gewindesicherungsstift	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
4	GS2009-040	Gleitscheibe, Ø = 20 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2009-045					
4	GS2009-050					
4	GS2009-055					
4	GS2009-060					
5	SH0262-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	SH0262-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral				
6	SC1405-L10	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SC1405-L10	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
8	BR1009-L025	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
10	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten