



Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB1069-L0810	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2a	SC9606-L10ST	Justierschraube	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
3	GS4007	Gewindesicherungsstift	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
4	GS2611-040	Gleitscheibe, Ø = 26 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5	SF0265-AL	Deckplatte	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SC1406-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
8	BR1211-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
10	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten