


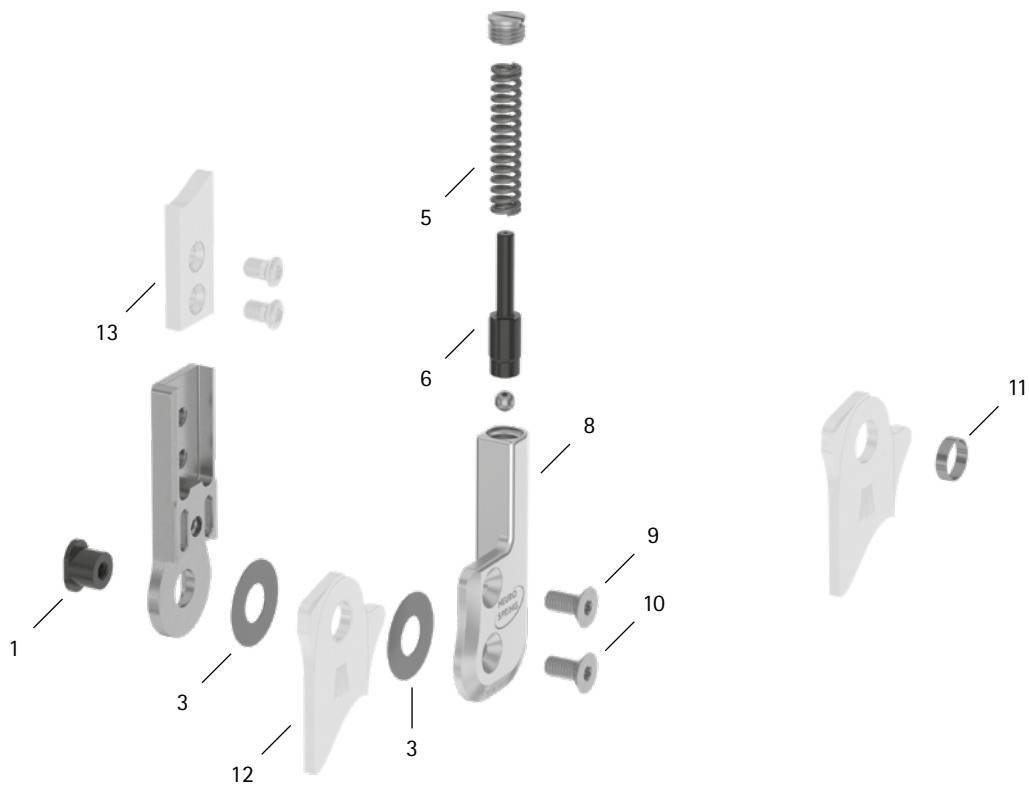

Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB8559-L0580	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	GS2009-040	Gleitscheibe, Ø = 20 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
3	GS2009-045					
3	GS2009-050					
3	GS2009-055					
3	GS2009-060					
5	FE1634-02	Druckfeder, goldfarben	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6	SF0342-75	Bolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SF0362-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SF0362-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral				
9	SC1405-L10	Senkschraube mit Innensechsrund	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
10	SC1405-L10	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
11	BR1009-L025	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
12	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
13	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten