



Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB9669-L0760	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
2a	SC9606-L10ST	Justierschraube	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
3	GS4007	Gewindesicherungsstift	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf
4	GS2210-040	Gleitscheibe, Ø = 22 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2210-045					
4	GS2210-050					
4	GS2210-055					
4	GS2210-060					
6	FE2836-02	Druckfeder, goldfarben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7	SF0343-72	Bolzen**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
9	SF0463-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
9	SF0463-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral**				
10	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
11	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
5-11	SF4973-L/AL	Funktionseinheit, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5-11	SF4973-R/AL	Funktionseinheit, links medial oder rechts lateral***				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
12	BR1110-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
13	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
14	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar