



Pos.	10 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB6039-L0580	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0390-01	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	GS1206-040	Gleitscheibe, Ø = 12 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS1206-045					
4	GS1206-050					
4	GS1206-055					
4	GS1206-060					
5	SF0760-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	SF0760-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral**				
7	FE1622-01	Druckfeder, goldfarben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
8	SF0840-07	Bolzen**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
10	SC1403-L08	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
11	SC1403-L08	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
5-11	SF7970-L/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5-11	SF7970-R/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral***				
Systemfüßbügel, Systemmanker und Systemschienen						
12	BP0706-L020	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
13	siehe Katalog	Systemfüßbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
14	siehe Katalog	Systemmanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar