


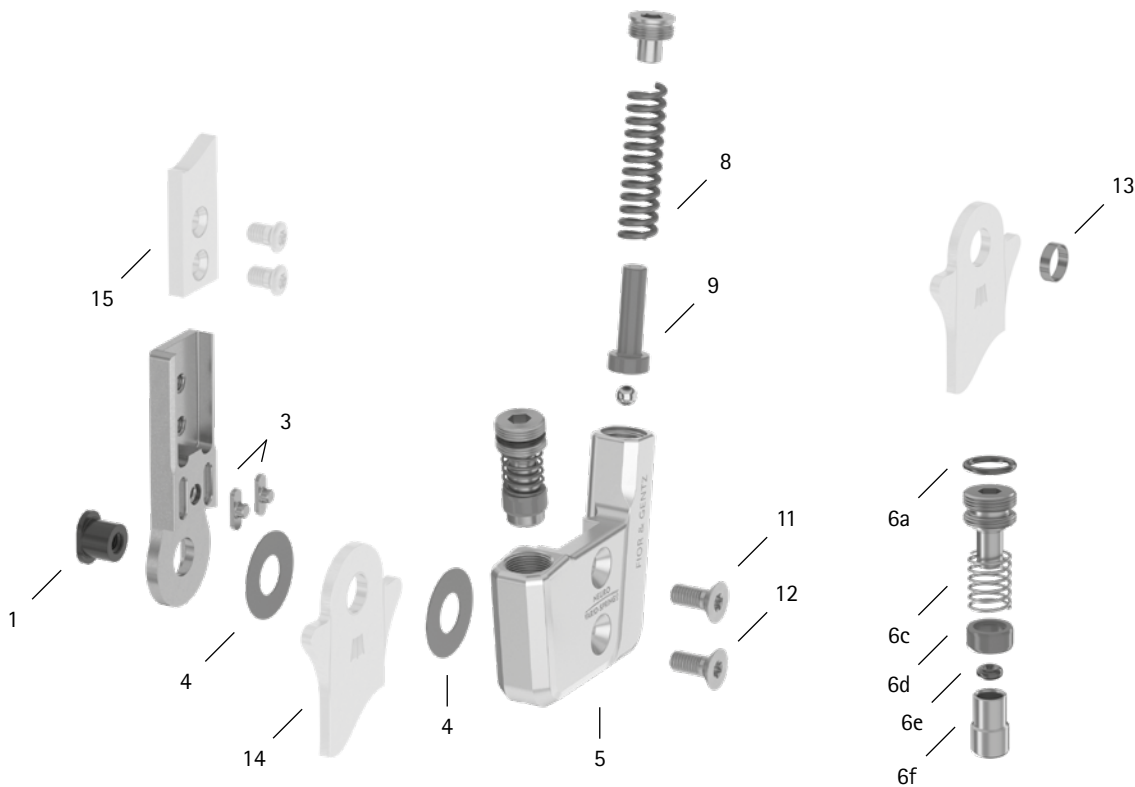

Pos.	10 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB6039-L0580	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0390-01	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	GS1206-040	Gleitscheibe, Ø = 12 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS1206-045					
4	GS1206-050					
4	GS1206-055					
4	GS1206-060					
5	SF0860-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	SF0860-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral**				
6a	VE3771-04/10	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6c	FE1615-01	Druckfeder**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6d	GS0604-350	Gleitbuchse**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6e	PN0003-L02	Anschlagdämpfer**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6f	SH0490-01	Kolben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	FE1622-01	Druckfeder, goldfarben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	SF0840-07	Bolzen**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
11	SC1403-L08	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
12	SC1403-L08	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
5-12	SF8970-L/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5-12	SF8970-R/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral***				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
13	BP0706-L020	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
14	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
15	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar