


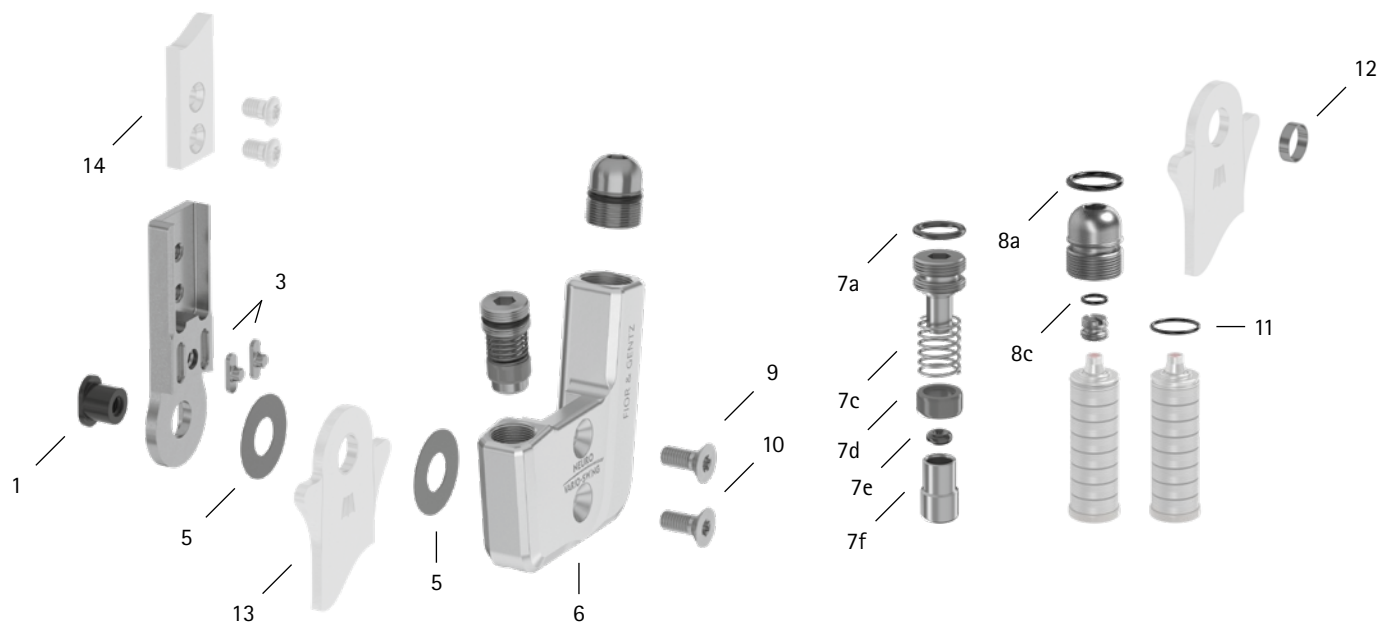

Pos.	10 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB6039-L0580	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0390-01	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	GS1206-040	Gleitscheibe, Ø = 12 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5	GS1206-045					
5	GS1206-050					
5	GS1206-055					
5	GS1206-060					
6	SH0460-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SH0460-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral**				
7a	VE3771-04/10	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7c	FE1615-01	Druckfeder**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7d	GS0604-350	Gleitbuchse**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7e	PN0003-L02	Anschlagdämpfer**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7f	SH0490-01	Kolben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8a	VE3771-06/11	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
8c	VE3771-03/10	O-Ring zur Sicherung der Bewegungslimitierungsschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	SC1403-L08	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
10	SC1403-L08	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
6-10	SH4970-L/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6-10	SH4970-R/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral***				

Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

Pos.	10 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Federeinheiten						
11	VE3771-045/10	O-Ring zur Sicherung der Federeinheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
-	SF5800-15/02	Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verrutschen der Tellerfedern Geräusche der Federeinheit	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
-	SF5800-15/04	Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit		Tellerfedern mit Zange neu aus- richten		
-	SF5800-10/06	Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit		Federeinheit mit Sprühöl (Art.-Nr. FT3000-15) fetten		
-	SF5800-10/09	Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit				
-	SF5800-05/17	Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
12	BP0706-L020	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
13	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
14	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar