



Pos.	12 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB7049-L0590	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0391-01	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	GS1407-040	Gleitscheibe, Ø = 14 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS1407-045					
4	GS1407-050					
4	GS1407-055					
4	GS1407-060					
5	SH0461-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	SH0461-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral**				
6a	VE3771-050/10	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6c	FE1611-01	Druckfeder**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6d	GS0705-525	Gleitbuchse**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6e	PN0004-L02	Anschlagdämpfer**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6f	SH0491-01	Kolben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7a	VE3771-08/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
7c	VE3771-04/10	O-Ring zur Sicherung der Bewegungs-limitierungsschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
8	SC1404-L10	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
9	SC1404-L10	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
5-9	SH4971-L/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5-9	SH4971-R/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral***				

Patientenkommission/Konfigurations-ID _____

Pos.	12 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Federeinheiten						
10	VE3771-06/10	O-Ring zur Sicherung der Federeinheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
-	SF5801-15/03	Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
-	SF5801-15/06	Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit	Verrutschen der Tellerfedern	Tellerfedern mit Zange neu ausrichten		
-	SF5801-10/12	Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit	Geräusche der Federeinheit mit Druckfeder	Druckfeder mit Orthesengelenkfett oder Sprühöl (Art.-Nr. FT3000-15) fetten		
-	SF5801-10/19	Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit				
-	SF5801-05/33	Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit	Geräusche der Federeinheit mit Tellerfedern	Tellerfedern seitlich mit Sprühöl (Art.-Nr. FT3000-15) fetten		
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
11	BR0807-L020	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
12	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
13	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar