



| Pos.                | 12 mm        | Bezeichnung   | Mögliches Problem            | Maßnahme    | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|---------------------|--------------|---|------------------------------|-------------|---|--------------------------|
| <b>Systemgelenk</b> |              |   |                              |             |   |                          |
| 1                   | SB7049-L0590 | Splintbolzen  | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 3                   | SF0391-01    | Passfeder mit Stift                                       | Bruch                        | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 5                   | GS1407-040   | Gleitscheibe, Ø = 14 mm                                   | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 5                   | GS1407-045   |   |                              |             |   |                          |
| 5                   | GS1407-050   |   |                              |             |   |                          |
| 5                   | GS1407-055   |   |                              |             |   |                          |
| 5                   | GS1407-060   |   |                              |             |   |                          |
| 6                   | SH0561-AL    | Deckplatte**  | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 7                   | SH0491-01    | Kolben**  | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 8                   | PN0004-L02   | Anschlagdämpfer**   | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 9                   | GS0705-525   | Gleitbuchse**   | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 10                  | FE1611-01    | Druckfeder**  | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 11a                 | VE3771-08/15 | O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**         | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 11c                 | VE3771-04/10 | O-Ring zur Sicherung der Bewegungs-limitierungsschraube** | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 12                  | SC1404-L10   | Senkschraube mit Innensechsrund**                         | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 13                  | SC1404-L10   | Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**          |                              |             |   |                          |
| 6-13                | SH5971-AL    | Funktionseinheit plug + go Modularität***                 | Funktionsverlust, Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |

Patientenkommission/Konfigurations-ID \_\_\_\_\_



| Pos.  | 12 mm         | Bezeichnung  | Mögliches Problem            | Maßnahme   | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|---|---------------|--|------------------------------|--|---|--------------------------|
| <b>Federeinheiten</b>                                 |               |  |                              |  |   |                          |
| 14  | VE3771-06/10  | O-Ring zur Sicherung der Federeinheit                      | Verschleiß                   | austauschen  | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 15  | SH5801-15/03  | Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit     | Verschleiß                   | austauschen  | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 15  | SH5801-15/06  | Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit     |                              |  |   |                          |
| 15  | SH5801-10/12  | Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit      | Verrutschen der Tellerfedern | Tellerfedern mit Zange neu ausrichten                | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 15  | SH5801-10/19  | Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit | Geräusche der Federeinheit   | Federeinheit mit Sprühöl (Art.-Nr. FT3000-15) fetten |   |                          |
| 15  | SH5801-05/33  | Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit  |                              |  |   |                          |
| <b>Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen</b> |               |  |                              |  |   |                          |
| 16  | BR0807-L020   | Gleitbuchse  | Verschleiß                   | austauschen  | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 17  | siehe Katalog | Systemfußbügel   | Verschleiß oder Bruch        | austauschen  | alle 6 Monate                           | 48 Monaten               |
| 18  | siehe Katalog | Systemanker und Systemschienen                             | Verschleiß oder Bruch        | austauschen  | alle 6 Monate                           | nach Bedarf              |

\* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

\*\* ist Bestandteil der Funktionseinheit

\*\*\* enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar