



Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB8559-L0630	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0392-02	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	GS2009-040	Gleitscheibe, Ø = 20 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
5	GS2009-045					
5	GS2009-050					
5	GS2009-055					
5	GS2009-060					
6	SF0762-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6	SF0762-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral**				
8	FE2736-01	Druckfeder, goldfarben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	SF0842-08	Bolzen**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
11	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
12	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
6-12	SF7972-L/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6-12	SF7972-R/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral***				
Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen						
13	BR1009-L025	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
14	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
15	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar