



| Pos.  | 14 mm         | Bezeichnung   | Mögliches Problem            | Maßnahme    | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|---|---------------|---|------------------------------|-------------|---|--------------------------|
| <b>Systemgelenk</b>                                   |               |   |                              |             |   |                          |
| 1   | SB8559-L0630  | Splintbolzen  | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 3   | SF0392-02     | Passfeder mit Stift   | Bruch                        | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 4   | GS2009-040    | Gleitscheibe, Ø = 20 mm   | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 4   | GS2009-045    |   |                              |             |   |                          |
| 4   | GS2009-050    |   |                              |             |   |                          |
| 4   | GS2009-055    |   |                              |             |   |                          |
| 4   | GS2009-060    |   |                              |             |   |                          |
| 5   | SF0762-L/AL   | Deckplatte, links lateral oder rechts medial**                              | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 5   | SF0762-R/AL   | Deckplatte, links medial oder rechts lateral**                              |                              |             |   |                          |
| 7   | FE2736-01     | Druckfeder, goldfarben**  | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 8   | SF0842-08     | Bolzen**  | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 10  | SC1405-L11    | Senkschraube mit Innensechsrund**   | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 11  | SC1405-L11    | Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**                            |                              |             |   |                          |
| 5-11  | SF7972-L/AL   | Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial*** | Funktionsverlust, Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate                           | 36 Monaten               |
| 5-11  | SF7972-R/AL   | Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral*** |                              |             |   |                          |
| <b>Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen</b> |               |   |                              |             |   |                          |
| 12  | BR1009-L025   | Gleitbuchse   | Verschleiß                   | austauschen | alle 6 Monate                           | 18 Monaten               |
| 13  | siehe Katalog | Systemfußbügel  | Verschleiß oder Bruch        | austauschen | alle 6 Monate                           | 48 Monaten               |
| 14  | siehe Katalog | Systemanker und Systemschienen  | Verschleiß oder Bruch        | austauschen | alle 6 Monate                           | nach Bedarf              |

\* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

\*\* ist Bestandteil der Funktionseinheit

\*\*\* enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar