



Pos.	14 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
<b>Systemgelenk</b>						
1	SB8559-L0630	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0392-02	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	GS2009-040	Gleitscheibe, $\varnothing = 20$ mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2009-045					
4	GS2009-050					
4	GS2009-055					
4	GS2009-060					
5	SF0862-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	SF0862-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral**				
6a	VE3771-08/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6c	FE1916-01	Druckfeder**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6d	GS1007-350	Gleitbuchse**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6e	VE3771-010/20	O-Ring-Dämpfer**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6f	SH0492-01	Kolben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	FE2736-01	Druckfeder, goldfarben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
9	SF0842-08	Bolzen**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
11	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
12	SC1405-L11	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
5-12	SF8972-L/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5-12	SF8972-R/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral***				
<b>Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen</b>						
13	BR1009-L025	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
14	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
15	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

\* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

\*\* ist Bestandteil der Funktionseinheit

\*\*\* enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar