



Pos.	16 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
<b>Systemgelenk mit Passfedern</b>						
1	SB9669-L0760	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0393-02	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	GS2210-040	Gleitscheibe, Ø = 22 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2210-045					
4	GS2210-050					
4	GS2210-055					
4	GS2210-060					
5	SF0663-AL	Deckplatte**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
6a	VE3771-09/15	O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6c	FE1027-01	Druckfeder**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6d	GS1108-500	Gleitbuchse**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6e	VE3771-012/26	O-Ring-Dämpfer**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
6f	SH0493-01	Kolben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
7	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
8	SC1405-L12	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
5-8	SF6973-AL	Funktionseinheit plug + go Modularität***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
<b>Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen</b>						
9	BR1110-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
10	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
11	siehe Katalog	Systemanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

\* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

\*\* ist Bestandteil der Funktionseinheit

\*\*\* enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar