



| Pos. | 16 mm | Bezeichnung | Mögliches Problem | Maßnahme | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|---------------------|---------------|---|------------------------------|-------------|---|--------------------------|
| Systemgelenk | | | | | | |
| 1 | SB9669-L0760 | Splintbolzen | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 3 | SF0393-02 | Passfeder mit Stift | Bruch | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 5 | GS2210-040 | Gleitscheibe, Ø = 22 mm | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 5 | GS2210-045 | | | | | |
| 5 | GS2210-050 | | | | | |
| 5 | GS2210-055 | | | | | |
| 5 | GS2210-060 | | | | | |
| 6 | SH0463-L/AL | Deckplatte, links lateral oder rechts medial** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 6 | SH0463-R/AL | Deckplatte, links medial oder rechts lateral** | | | | |
| 7a | VE3771-09/15 | O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 7c | FE1027-01 | Druckfeder** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 7d | GS1108-500 | Gleitbuchse** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 7e | VE3771-012/26 | O-Ring-Dämpfer** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 7f | SH0493-01 | Kolben** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 8a | VE3771-11/15 | O-Ring zur Sicherung der Aufbaueinstellschraube** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 8c | VE3771-04/10 | O-Ring zur Sicherung der Bewegungslimitierungsschraube** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 9 | SC1405-L12 | Senkschraube mit Innensechsrund** | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 10 | SC1405-L12 | Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)** | | | | |
| 6-10 | SH4973-L/AL | Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial*** | Funktionsverlust, Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 36 Monaten |
| 6-10 | SH4973-R/AL | Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral*** | | | | |

| Pos. | 16 mm | Bezeichnung | Mögliches Problem | Maßnahme | Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch* | Spätester Austausch nach |
|---|---------------|--|------------------------------|--|---|--------------------------|
| Federeinheiten | | | | | | |
| 11 | VE3771-08/10 | O-Ring zur Sicherung der Federeinheit | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| - | SF5803-15/07 | Federeinheit, blau, normal, max. 15° Bewegungsfreiheit | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| - | SF5803-15/15 | Federeinheit, grün, mittel, max. 15° Bewegungsfreiheit | | | | |
| - | SF5803-10/21 | Federeinheit, weiß, stark, max. 10° Bewegungsfreiheit | Verrutschen der Tellerfedern | Tellerfedern mit Zange neu ausrichten | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| - | SF5803-10/31 | Federeinheit, gelb, sehr stark, max. 10° Bewegungsfreiheit | Geräusche der Federeinheit | Federeinheit mit Sprühöl (Art.-Nr. FT3000-15) fetten | | |
| - | SF5803-05/63 | Federeinheit, rot, extra stark, max. 5° Bewegungsfreiheit | | | | |
| Systemfußbügel, Systemanker und Systemschienen | | | | | | |
| 12 | BR1110-L030 | Gleitbuchse | Verschleiß | austauschen | alle 6 Monate | 18 Monaten |
| 13 | siehe Katalog | Systemfußbügel | Verschleiß oder Bruch | austauschen | alle 6 Monate | 48 Monaten |
| 14 | siehe Katalog | Systemanker und Systemschienen | Verschleiß oder Bruch | austauschen | alle 6 Monate | nach Bedarf |

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar