



Pos.	20 mm	Bezeichnung	Mögliches Problem	Maßnahme	Empfohlene Überprüfung, ggf. Austausch*	Spätester Austausch nach
Systemgelenk						
1	SB1069-L0960	Splintbolzen	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
3	SF0395-02	Passfeder mit Stift	Bruch	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
4	GS2611-040	Gleitscheibe, Ø = 26 mm	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
4	GS2611-045					
4	GS2611-050					
4	GS2611-055					
4	GS2611-060					
5	SF0765-L/AL	Deckplatte, links lateral oder rechts medial**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5	SF0765-R/AL	Deckplatte, links medial oder rechts lateral**				
7	FE2966-01	Druckfeder, goldfarben**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
8	SF0845-10	Bolzen**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
10	SC1405-L14	Senkschraube mit Innensechsrund**	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
11	SC1406-L14	Senkschraube mit Innensechsrund (Achsschraube)**				
5-11	SF7975-L/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links lateral oder rechts medial***	Funktionsverlust, Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	36 Monaten
5-11	SF7975-R/AL	Funktionseinheit plug + go Modularität, links medial oder rechts lateral***				
Systemfußbügel, Systemmanker und Systemschienen						
12	BR1211-L030	Gleitbuchse	Verschleiß	austauschen	alle 6 Monate	18 Monaten
13	siehe Katalog	Systemfußbügel	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	48 Monaten
14	siehe Katalog	Systemmanker und Systemschienen	Verschleiß oder Bruch	austauschen	alle 6 Monate	nach Bedarf

* je nach Einschätzung des Inverkehrbringers der Sonderanfertigung in Bezug auf das Nutzungsverhalten des Patienten

** ist Bestandteil der Funktionseinheit

*** enthaltene Systembauteile auch separat austauschbar